
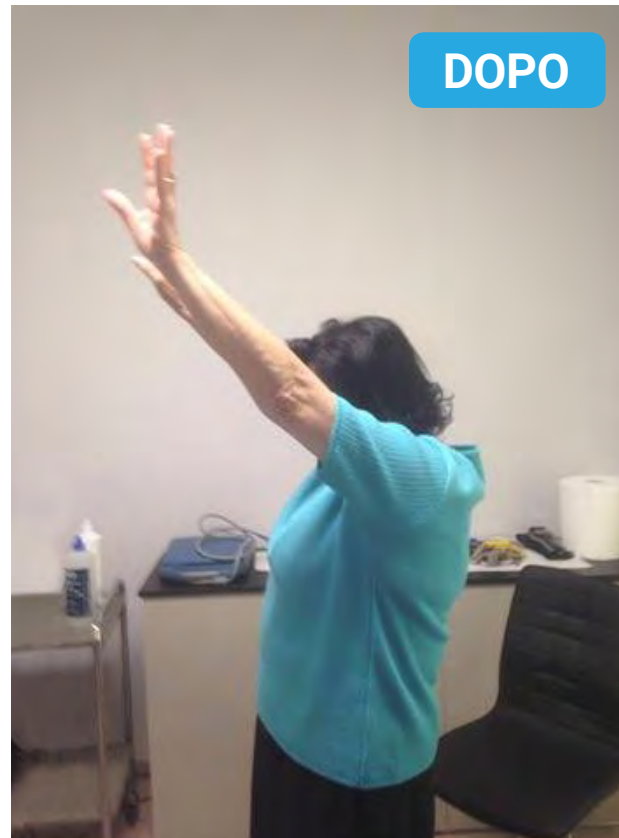


Trattamento con ENF Terapia di artrosi scapolo-omerale e tendinosi della cuffia dei rotatori.

Paziente: Donna, 79 anni
Professionista: Dott. Vincenzo Cafiero - Napoli
Trattamento: 1 seduta

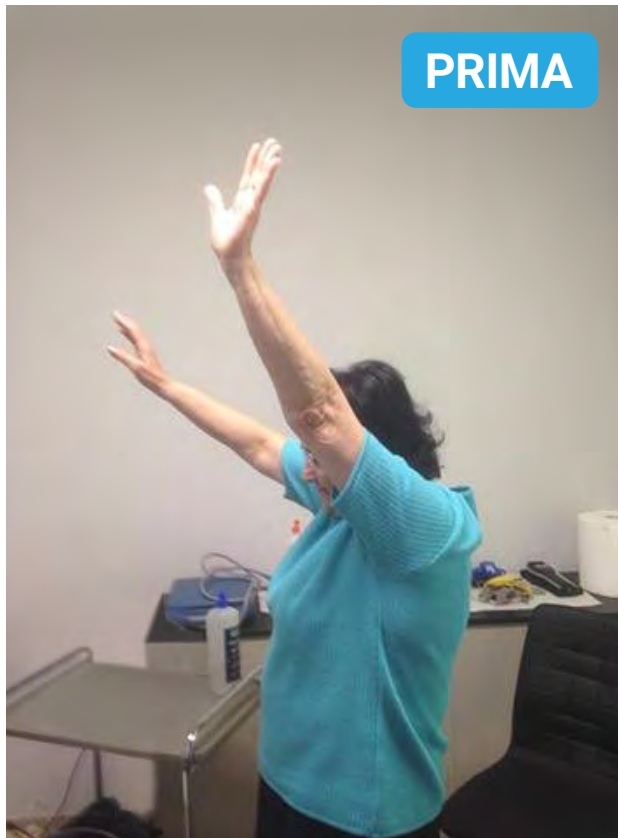

Trattamento ENF:



Terapia Libera con i trattamenti "Antinfiammatorio Cronico", "Rigenerante Osteotendineo" e "Drenante Superficiale" associato a cauta kinesi passiva.
Tempo di trattamento 20 minuti.

Conclusioni:

All'inizio del trattamento la mobilità articolare era ridotta e sono stati effettuati: il Test di Yocum (positivo), il Test Lift-off (positivo), il Test di Patte (parzialmente positivo). Alla fine del primo trattamento sono stati ripetuti i test che sono risultati negativi ed è migliorato R.O.M. attivo/passivo con recupero di 20° sulla mobilità articolare.

Trattamento con ENF Terapia di ematoma del 2° dito del piede.

Paziente: Uomo, 38 anni
Professionista: Dott. Francesco Panarella - Napoli
Trattamento: 3 sedute in 5 giorni

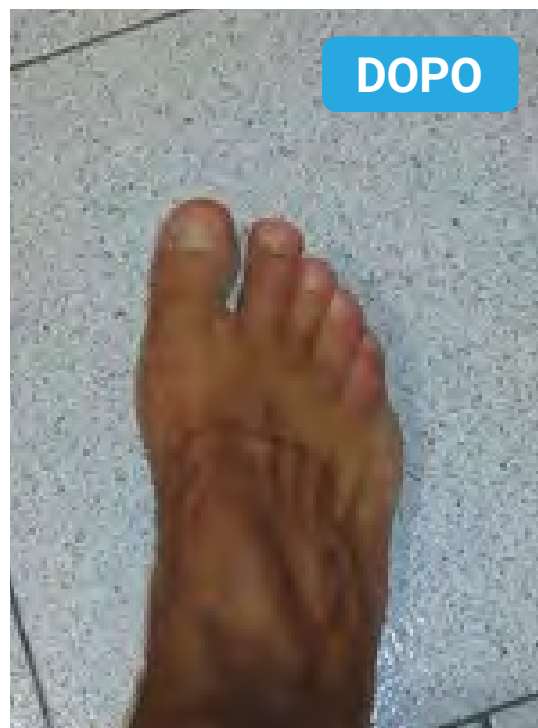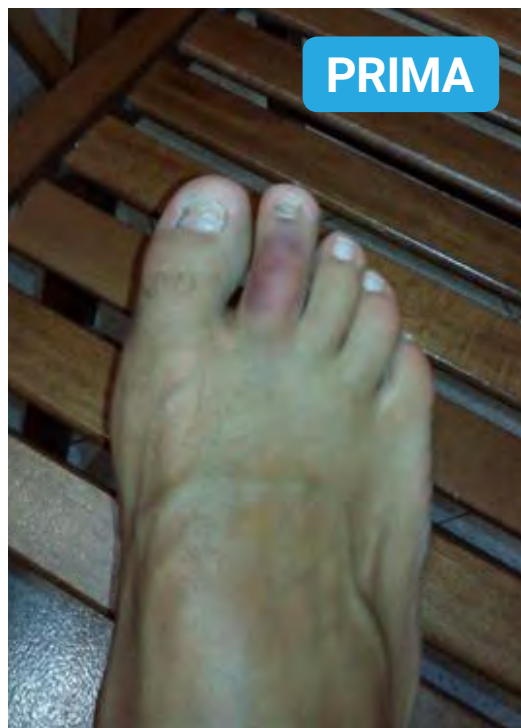

Trattamento ENF:

Terapia Libera con i trattamenti
“Antinfiammatorio” associato a
“Drenante Profondo” e “Rigenerante
Osteotendineo”.

Conclusioni:

In seguito alle tre sedute si è ottenuta
la risoluzione completa all'esame
obiettivo della sintomatologia riferita.

Trattamento con ENF Terapia di frattura pluriframmentata scomposta della rotula parzialmente solidificata, con problemi alla flessione.


Paziente: Donna, 78 anni
Professionista: Dott. Vincenzo Cafiero - Napoli
Trattamento: 6 sedute in 3 settimane

Trattamento ENF:

Terapia Libera con i trattamenti "Antinfiammatorio Cronico", "Aderenze Post-operatorie", "Rigenerante Osteotendineo" e "Drenante Superficiale" associato a kinesi passiva ed attiva.

Conclusioni:

A due mesi dall'intervento di cerchiaggio dinamico della rotula, la frattura era parzialmente solidificata e con problemi alla flessione. Dopo 6 sedute di trattamento il R.O.M. è arrivato a 115°, il dolore è divenuto lieve e si manifesta dolo durante discesa delle scale.

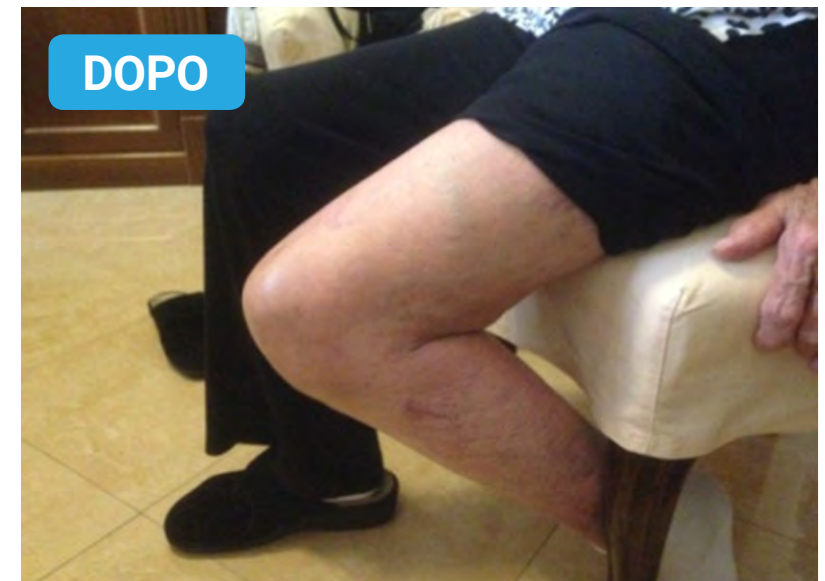

Trattamento con ENF Terapia di endometriosi.

Paziente: Donna, 49 anni
Professionista: Dott. Agostino Caroleo - Catanzaro
Trattamento: 15 sedute in 45 giorni

Trattamento ENF:

Terapia Libera con i trattamenti
"Antinfiammatorio Cronico", "Aderenze Post-operatorie"
e "Drenante Superficiale".

Conclusioni:


Durante la terapia, la paziente ha riferito sempre discreto benessere con diminuzione della dolorabilità addominale con conseguente regolarità mestruale.

In seguito ai trattamenti si è ottenuto un miglioramento ecografico e remissione della sintomatologia riferita dalla paziente.



Trattamento con ENF Terapia di lesione del legamento crociato anteriore (LCA).

Paziente: Donna, 27 anni
Professionista: Dott. Laura Delaudi - Genova
Trattamento: 15 sedute in 5 settimane

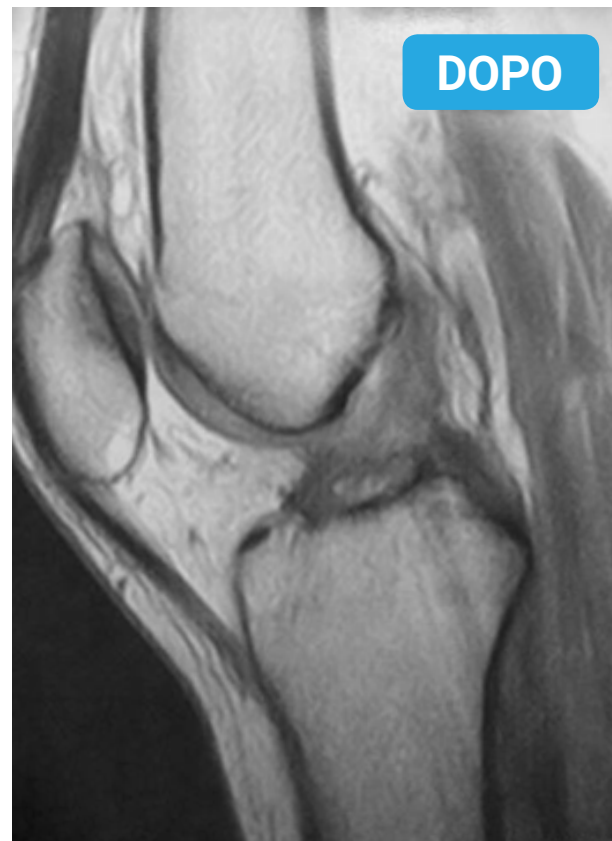

Trattamento ENF:

Terapia Libera con i trattamenti "Rigenerante Osteotendineo" ed "Antinfiammatorio Cronico".

Conclusioni:

In seguito a lesione di LCA, è stato effettuato un primo ciclo di ENF terapia, al termine del quale la paziente non accusava più dolore e la RMN mostrava il legamento disomogeneo e sottile nel tratto prossimale come in esito di parziale disinserimento da tale sede. Si è proseguito con ENF terapia per 6 sedute in 3 settimane ottenendo un ulteriore miglioramento funzionale.

Trattamento con ENF Terapia di lesione del muscolo bicipite femorale, con presenza di estesa raccolta liquida irregolare e di aspetto anfrattuoso da ematoma intramuscolare in fase di organizzazione.

Paziente: Uomo, 42 anni
Professionista: Dott. Francesco Loiacono - Conversano (BA)
Trattamento: 9 sedute. Trattamento iniziato dopo due giorni dal trauma

Trattamento ENF:

Nelle prime tre sedute, Terapia Libera con il trattamento "Drenaggio Profondo". Dalla quarta seduta aggiunti "Antinfiammatorio Cronico" e "Rigenerante Tessuti Molli" e dalla settima seduta aggiunto "Aderenze Post-operatorie".

Conclusioni:

A 25 giorni dal trauma il paziente è completamente autonomo e non ha dolore. Data la gravità dell'infortunio sono stati rispettati i tempi biologici, è stato consigliato di continuare la rieducazione in piscina e di riprendere a correre dopo qualche altro giorno.



Trattamento con ENF Terapia di ematoma esteso.

Paziente: Ragazza, ginnasta
Professionista: Dott. Giuseppe Manzo - Selvazzano (PD)
Trattamento: 8 sedute in 10 giorni



Trattamento ENF:

Terapia Libera con i trattamenti
“Drenante Superficiale” e
“Rigenerante Tessuti Molli”.

Conclusioni:

Dalla prima seduta l’ematoma ha iniziato a ridursi gradualmente. Dopo 8 sedute di ENF terapia si nota un assorbimento dell’ematoma molto più veloce del normale processo fisiologico.

Trattamento con ENF Terapia di cicatrice ipertrofica.


Paziente: Bambina, 6 anni
Professionista: Fisioterapista (Messina)
Trattamento: 9 sedute
3 alla settimana per 3 settimane

Trattamento ENF:

Terapia Libera con i trattamenti "Antinfiammatorio", "Drenante Superficiale" e "Rigenerante Tessuti Molli".

Conclusioni:

Oltre all'effetto antiinfiammatorio ed antiedemigeno, si può notare la notevole capacità di rimodellamento dei tessuti dell'ENF.

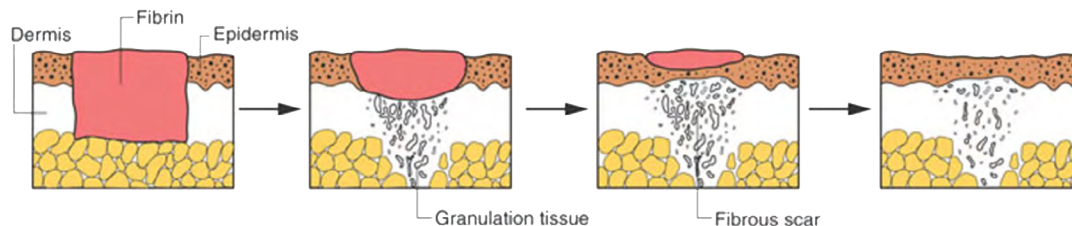

Trattamento con ENF Terapia di frattura scomposta della testa dell'Omero.




Paziente: Uomo, 41 anni
Professionista: Fisioterapista (Brescia)
Trattamento: 12 sedute
3 alla settimana per un mese

Trattamento ENF:

Terapia Libera con il trattamento "Rigenerante Osteotendineo".

Conclusioni:

Si nota l'allineamento della frattura ed il ripristino delle linee di forza in tempi estremamente brevi, con effetto rigenerativo sui tessuti e sorprendente assenza del tipico callo osseo.

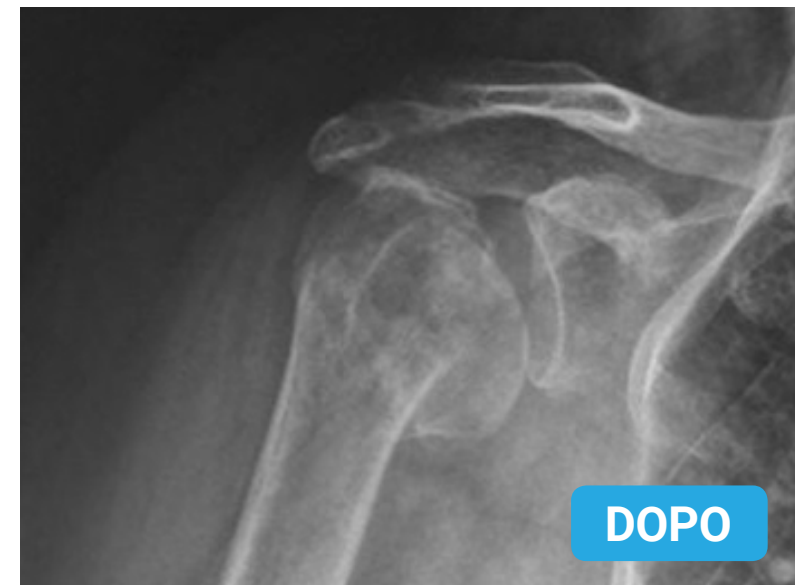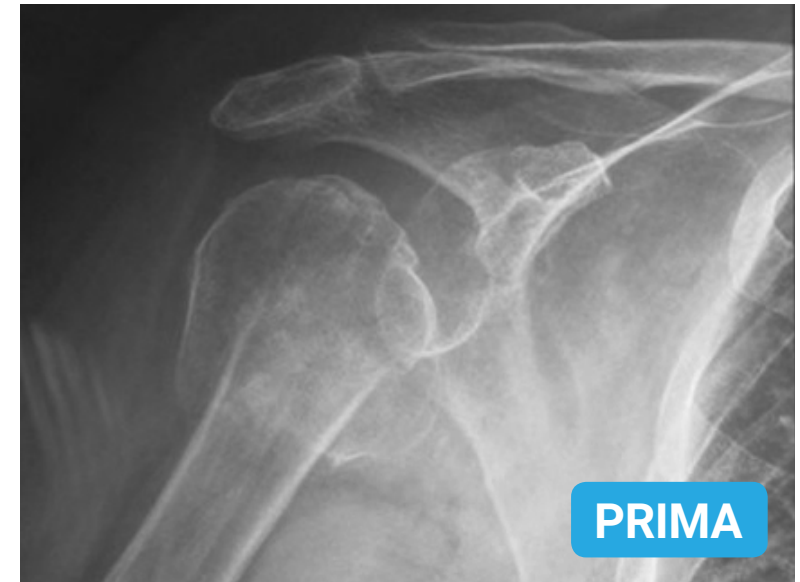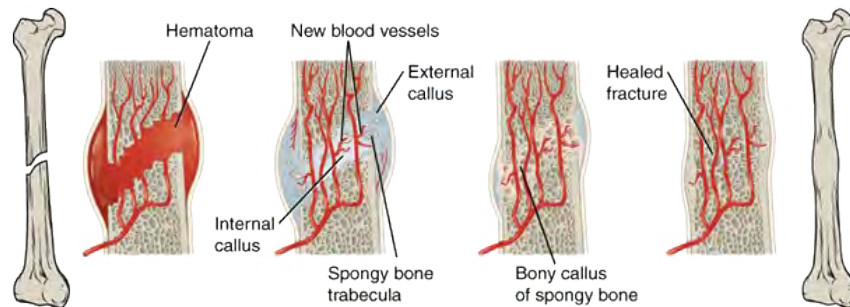

Trattamento con ENF Terapia di lesione profonda del tessuto gengivale.

Paziente: Ragazzo
Professionista: Dott. Manlio D'Andrea - Messina
Trattamento: 3 sedute in 5 giorni

Trattamento ENF:

Terapia Libera con il trattamento "Rigenerante Tessuti Molli".

Conclusioni:

Si nota un'evidente modificazione che riporta il tessuto gengivale in condizioni normali.



Trattamento con ENF Terapia di ematoma di cm. 2,49x1,69 nel muscolo vasto mediale.


Paziente: Uomo
Professionista: Dr. Giuseppe Manzo
Selvazzano (PD)
Trattamento: 6 sedute in 12 giorni

Trattamento ENF:

Terapia Libera con i trattamenti "Drenante Profondo" e "Rigenerante Tessuti Molli".

Conclusioni:

In seguito ai trattamenti, si evidenzia dell'ecografia la riduzione dell'ematoma.
(Ecografia: Dr. Locatelli - Padova)

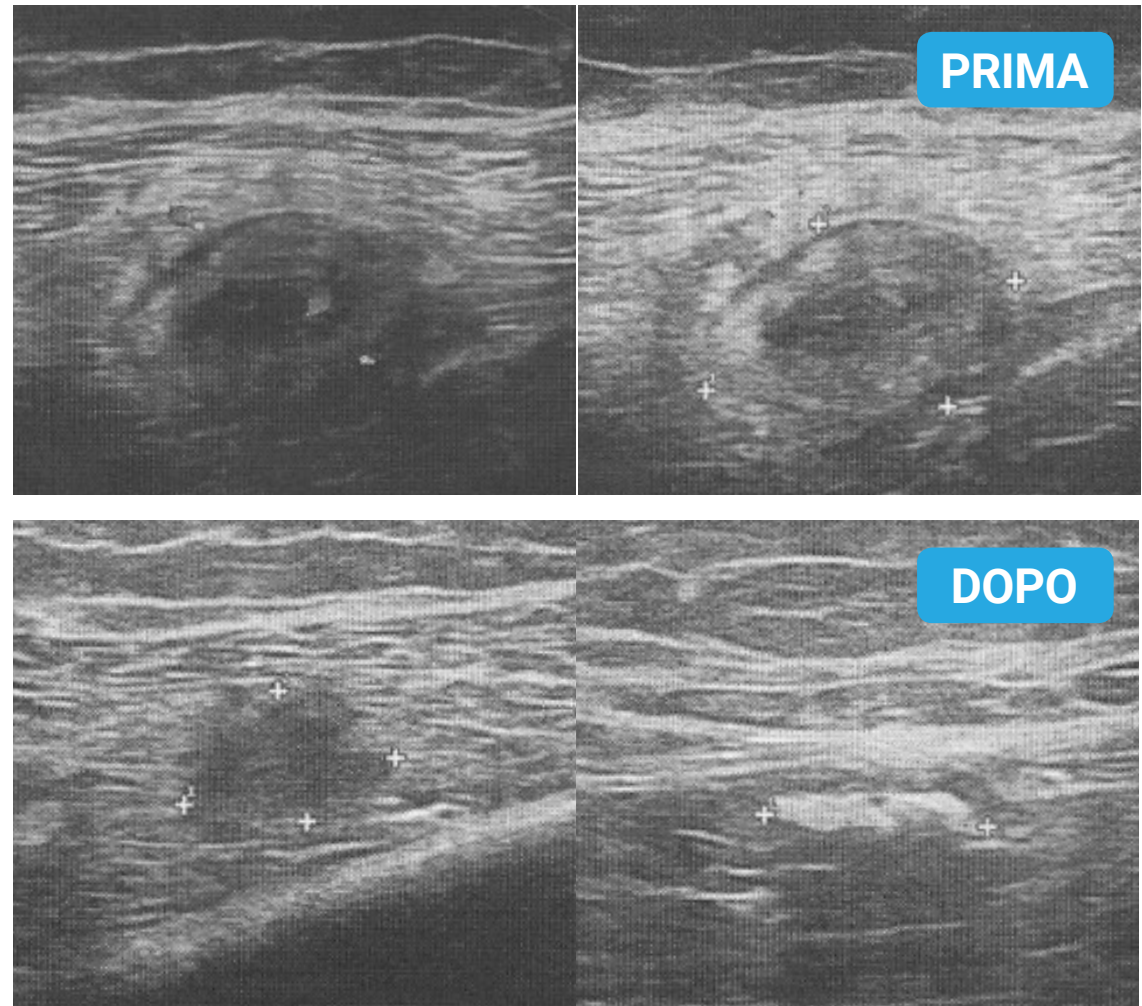

Trattamento con ENF Terapia di cifosi giovanile.

Paziente: Ragazzo, studente
Professionista: Dr. Giuseppe Manzo
Selvazzano (PD)
Trattamento: 1 seduta

Trattamento ENF:

Terapia Libera con il trattamento
“Decontratturante Muscolare”.

Conclusioni:

Dalla fotografia si evidenzia che dopo 1 sola seduta di ENF Terapia si è ottenuto un evidente miglioramento posturale.



Trattamento con ENF Terapia di cifosi.

Paziente: Uomo, 45 anni
Professionista: Dr. Giuseppe Manzo
Selvazzano (PD)
Trattamento: 1 seduta

Trattamento ENF:

Terapia Libera con il trattamento
“Decontratturante Muscolare”.

Conclusioni:

Dalla fotografia si evidenzia che dopo 1 sola seduta di ENF Terapia si è ottenuto un evidente miglioramento posturale.



Trattamento con ENF Terapia di cifosi.


Paziente: Uomo, 40 anni
Professionista: Dr. Giuseppe Manzo
Selvazzano (PD)
Trattamento: 1 seduta

Trattamento ENF:

Terapia Libera con il trattamento
“Decontratturante Muscolare”.

Conclusioni:

Dalla fotografia si evidenzia che dopo 1 sola seduta di ENF Terapia si è ottenuto un evidente miglioramento posturale.

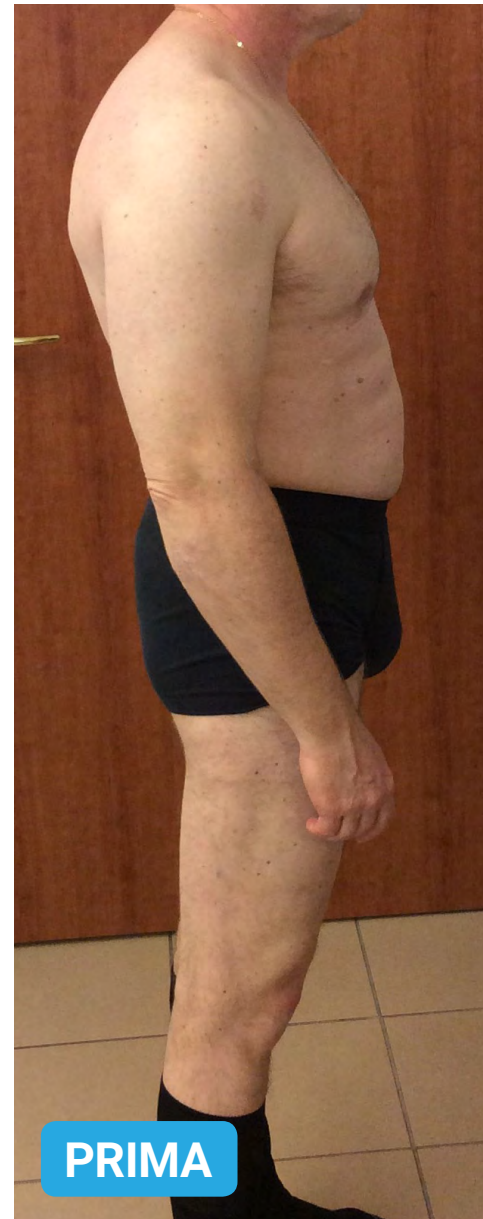


Trattamento con ENF Terapia di lesione reversibile del nervo radiale in seguito a frattura omero.

Paziente: Ragazzo, 16 anni, pilota di motocross
Professionista: Dott.ssa Silvia Milani - Carpenedolo (BS)
Trattamento: 20 sedute in 2 mesi



Watch the full video

<https://www.youtube.com/watch?v=Kjo09tuFciU>

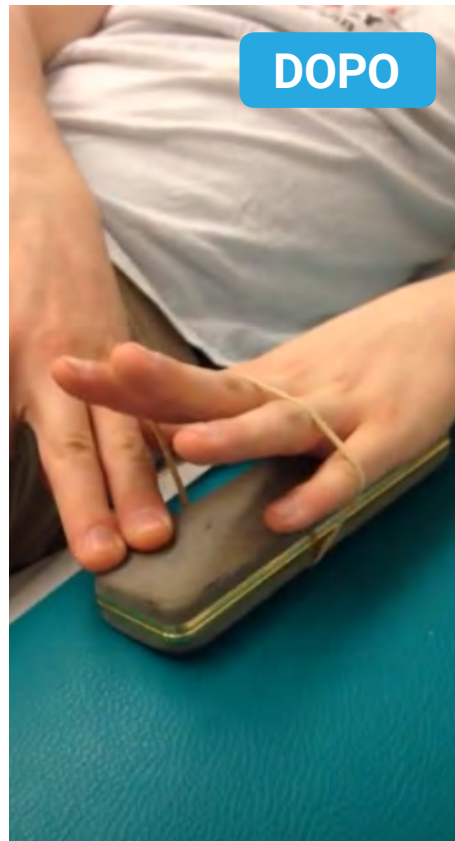

Trattamento ENF:

Terapia Libera con i trattamenti "Antinfiammatorio Cronico", "Drenante Superficiale" e "Rigenerante Osteotendineo".

Conclusioni:

La frattura scomposta dell'omero sinistro in seguito ad incidente evidenzia un danno a carico del nervo radiale sinistro con attività volontaria assente e mano cadente.

Già durante la prima seduta di ENF terapia il nervo ha risposto positivamente. Dopo due mesi di trattamento il paziente ha riacquisito l'attività motoria volontaria contro resistenza.

Trattamento con ENF Terapia di frattura del piatto tibiale con edema della spongiosa ossea adiacente.


Paziente: Donna, 28 anni
Professionista: Dr. Giuseppe Manzo - Selvazzano (PD)
Trattamento: 3 sedute

Trattamento ENF:

Terapia Libera con i trattamenti "Drenante Profondo" e "Rigenerante Osteotendineo".

Conclusioni:

Confrontando le RM si nota il riassorbimento dell'edema dell'emipiatto tibiale laterale ed il consolidamento della frattura; la rotula appare centrata nella gola intercondiloidea con spessore delle cartilagini conservato, il legamento crociato presenta uno spessore ridotto senza interruzioni delle sue fibre.

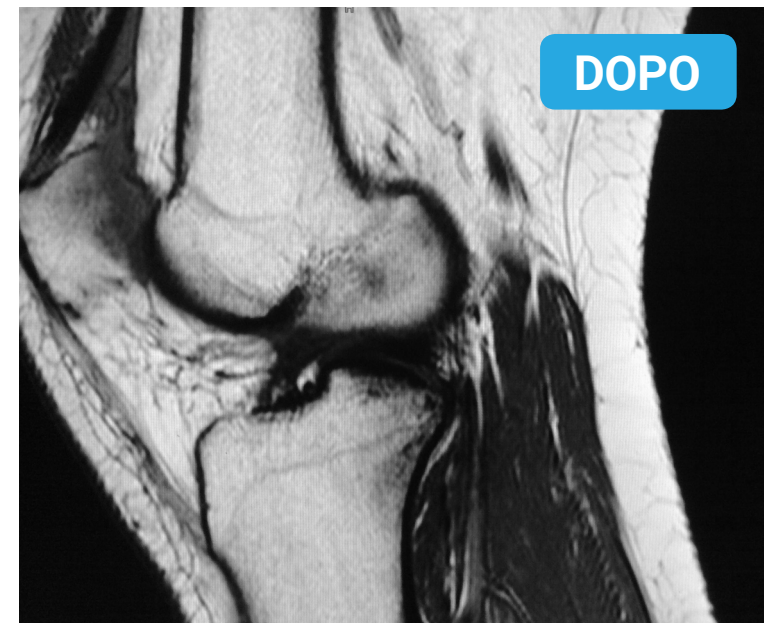


Trattamento con ENF Terapia di paresi del nervo facciale.

Paziente: Bambino, 10 anni
Professionista: Dr. Giovanni Barassi – Torre Maggiore (Foggia)
Trattamento: 10 sedute in 8 settimane



Trattamento ENF:

Terapia Libera con il trattamento "Drenante Superficiale" associato ad esercizi di recupero della mobilità.

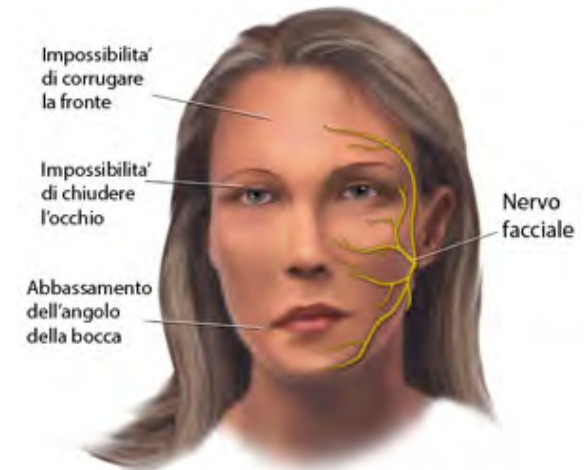


Conclusioni:

Si nota un evidente recupero della funzionalità dei muscoli facciali.

Trattamento con ENF Terapia di scoliosi.

Paziente: Ragazza, 14 anni
Professionista: Ft. Silvia Milani - Carpenedolo (Brescia)
Trattamento: 28 sedute in 3 mesi

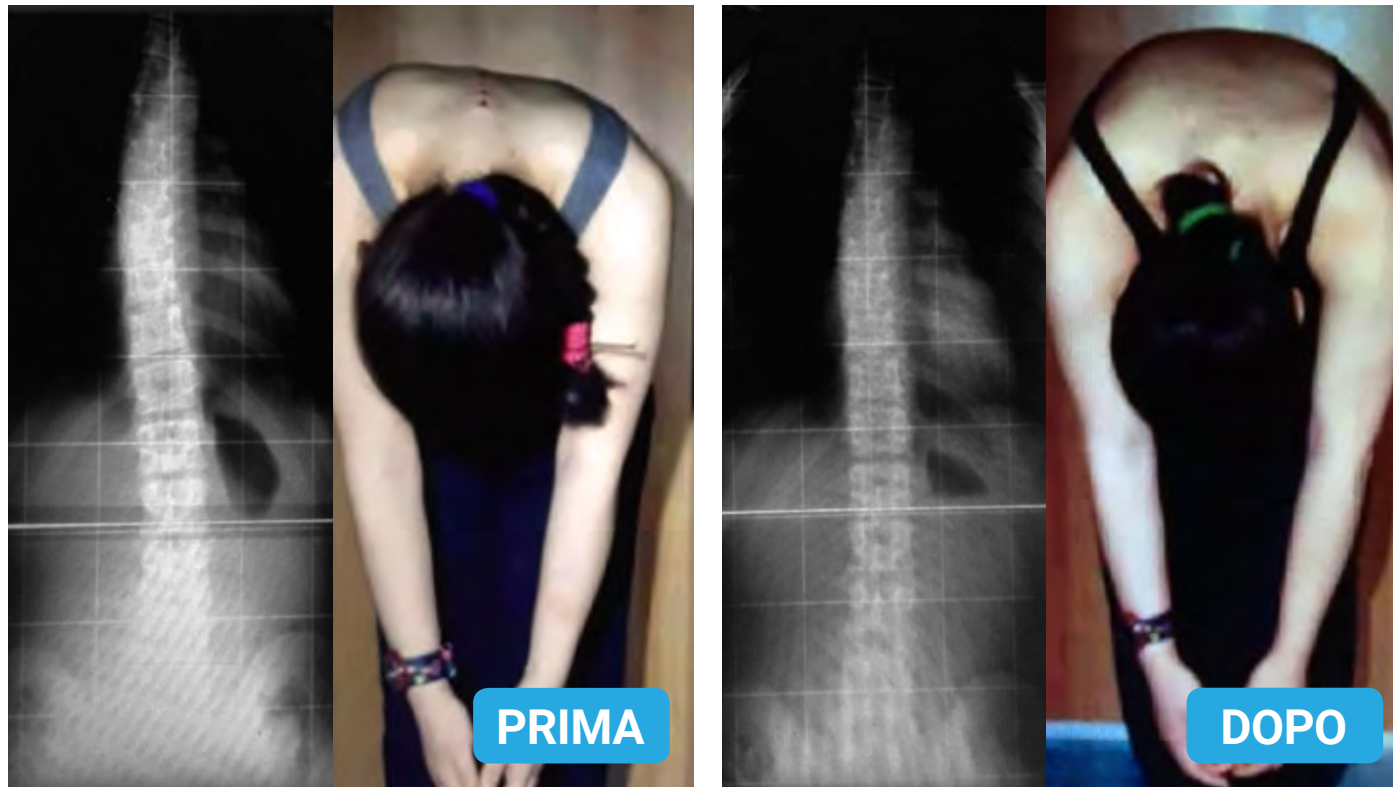

Trattamento ENF:
Terapia Libera con il trattamento "Decontratturante Muscolare".

Conclusioni:
Si nota la riduzione del gibbo toracico.

Trattamento con ENF Terapia di ustione di 3° grado.

Paziente: Bambino, 15 mesi
Professionista: Dr.ssa Francesca Mangraviti
Rometta Marea (Messina)
Trattamento: 22 sedute in un mese

Trattamento ENF:

Terapia Libera con i trattamenti "Rigenerante Tessuti Molli" e "Drenante Superficiale".


Conclusioni:

Dopo 3 mesi dall'incidente e le continue medicazioni la mano si presentava edematosa ed arrossata. Dalla fotografia si evidenzia che dopo l'ENF Terapia è in atto il processo di guarigione dei tessuti.



Trattamento con ENF Terapia di verruca.

Paziente: Uomo
Professionista: Dr.ssa Francesca Mangraviti - Rometta Marea (Messina)
Trattamento: 2 sedute in 1 mese

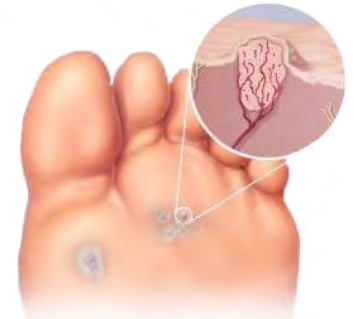

Trattamento ENF:

Terapia Libera con il trattamento
"Antinfiammatorio Acuto"

Conclusioni:

Dopo la prima seduta di trattamento la verruca è diventata ansitomatica. In seguito alla seconda seduta si evidenzia che è già in corso il processo di riparazione dei tessuti. Il procedimento non è invasivo e non procura danni ai tessuti circostanti.

Trattamento con ENF Terapia di scoliosi.



Paziente: Donna
Professionista: Dr.ssa Francesca Mangraviti
Rometta Marea (Messina)
Trattamento: 5 sedute in 2 mesi

Trattamento ENF:

Terapia Libera con i trattamenti
“Antinfiammatorio Cronico” e “Decontratturante”.

Conclusioni:

Dalla fotografia si evidenzia che dopo l'ENF
Terapia si è ottenuto una riduzione in gradi
dell'angolo scoliotico.

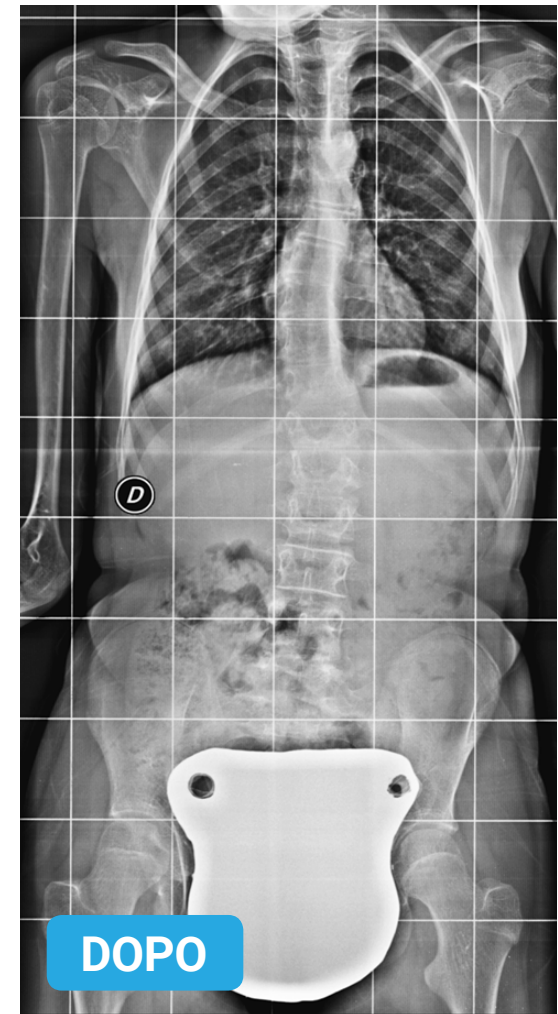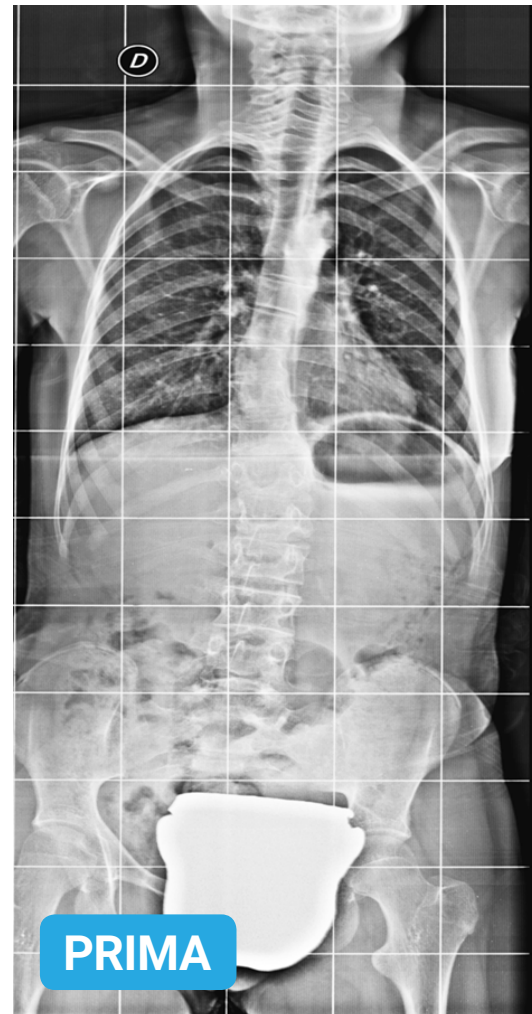

Trattamento con ENF Terapia di ciste sul dito indice.

Paziente: Donna
Professionista: Francesca Mangraviti
Rometta Marea (Messina)
Trattamento: 3 sedute

Trattamento ENF:

Terapia Libera con i trattamenti "Antinfiammatorio Acuto" e "Drenante Superficiale".

Conclusioni:

Dopo l'ENF Terapia si evidenzia la risoluzione completa della ciste.



Trattamento con ENF Terapia di frattura scomposta scapola sx.



Paziente: Uomo, 46 anni
Professionista: Dott. Fabio Marchini - Massa Carrara
Trattamento: 3 sedute

Trattamento ENF:

Terapia Libera con i trattamenti "Rigenerante Tessuti Molli" ed "Antalgico Grave".

Conclusioni:

Al termine del primo trattamento di ENF terapia, il paziente riferiva di non sentire già più dolore.

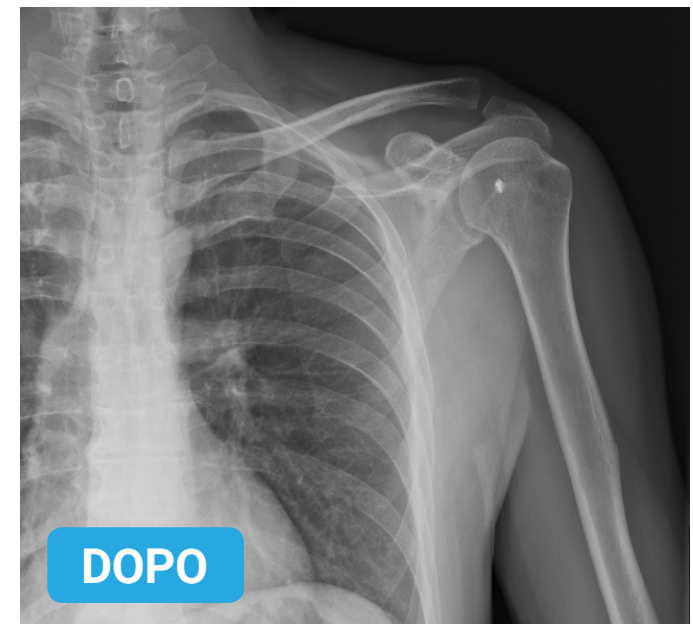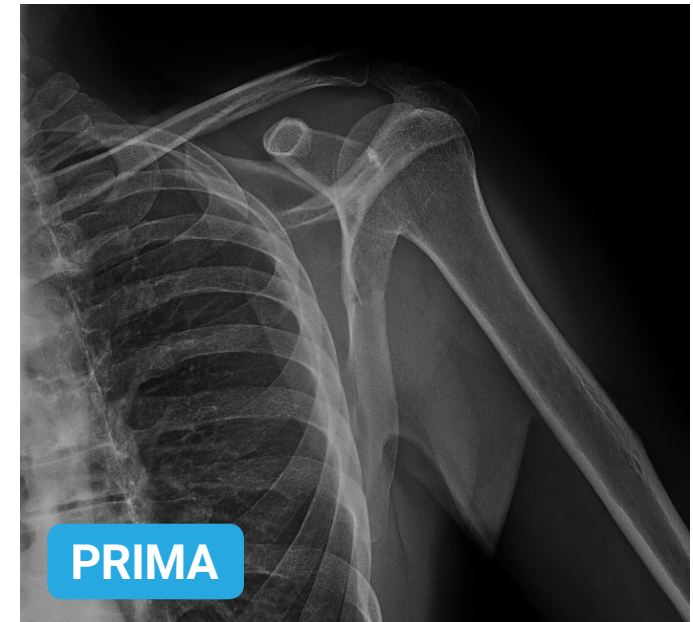

Trattamento con ENF Terapia di malattia paradontale, con perdita dell'architettura gengivale ed infiammazione/edema dei tessuti molli.

Paziente: Uomo
Professionista: Dr. Manlio D'Andrea – Messina
Trattamento: 5 sedute



Trattamento ENF:

Terapia Libera
con i trattamenti
“Antinfiammatorio Cronico”,
“Drenante Superficiale” e
“Rigenerante Tessuti Molli”.

Conclusioni:

Si nota un notevole recupero dell'architettura gengivale. L'ENF Terapia è stata condotta applicando una speciale sonda internamente al cavo orale.

Trattamento con ENF Terapia di lesione secondaria diabetica.

Paziente: Donna, 60 anni
Professionista: Dott. Caterina Dattoli - Foggia
Trattamento: 4 sedute



Trattamento ENF:

Terapia Libera con i trattamenti "Antinfiammatorio Acuto" e "Rigenerante Tessuti Molli".

Tempo di trattamento 14 minuti.

Conclusioni:

Dopo l'ENF Terapia si evidenzia la risoluzione della lesione ed il miglioramento della consistenza e della circolazione dell'arto.

Trattamento con ENF Terapia di post-intervento di asportazione linfonodale inguinale bilaterale.

Paziente: Donna, 50 anni
Professionista: Dott. Fabio Marchini
Massa Carrara
Trattamento: 4 sedute

Trattamento ENF:

Terapia Libera con i trattamenti "Antinfiammatorio Acuto" e "Rigenerante Tessuti Molli".


Conclusioni:

Prima della terapia, la ferita presentava tessuto necrotico. Già dopo il 2° trattamento ENF, si è ottenuta la facilitazione della cicatrizzazione. Il chirurgo riferisce alla paziente che la ferita è migliorata notevolmente, con un progresso di 4 settimane ottenuto in 1 settimana.



Trattamento con ENF Terapia di calazio della palpebra superiore dell'occhio destro.

Paziente: Bambino
Professionista: Dr. Dario Urzi - Padova
Trattamento: 5 sedute

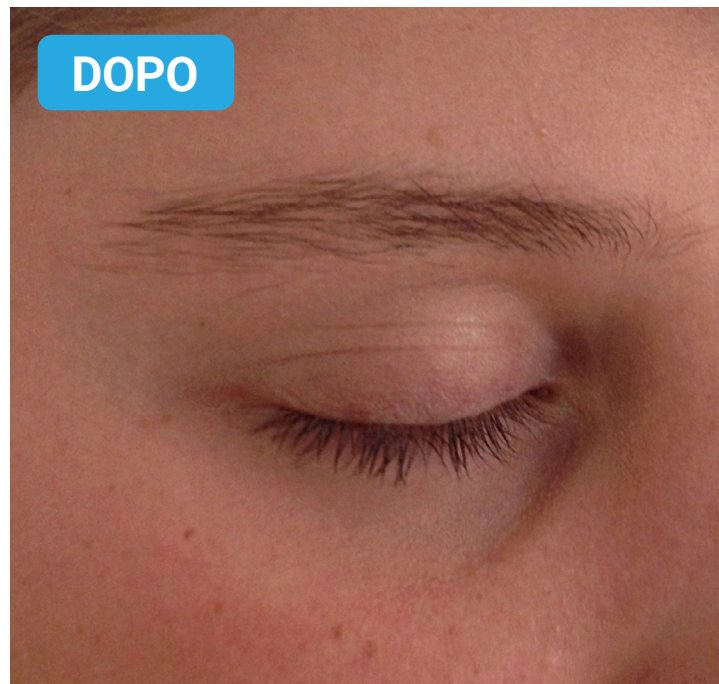

Trattamento ENF:

Terapia Libera con i trattamenti "Antinfiammatorio Cronico" e "Drenante Superficiale".

Tempo di trattamento 15 minuti.

Conclusioni:

Dopo l'ENF Terapia, alla palpazione non si rileva più alcun segno di ispessimento fibroso dei tessuti da residui della parete cistica del calazio completamente riassorbito.

Trattamento con ENF Terapia di frattura dell'estremo distale della V costa.


Paziente: Uomo, 44 anni
Professionista: Dott. Fabio Bendazzoli
Verona
Trattamento: 10 sedute

Trattamento ENF:

Terapia Libera con il trattamento "Rigenerante Osteotendineo".

Conclusioni:

Dopo l'ENF Terapia, si evidenzia il consolidamento della frattura. La V costa è di regolare trofismo e struttura ed ha conservato i rapporti articolari.

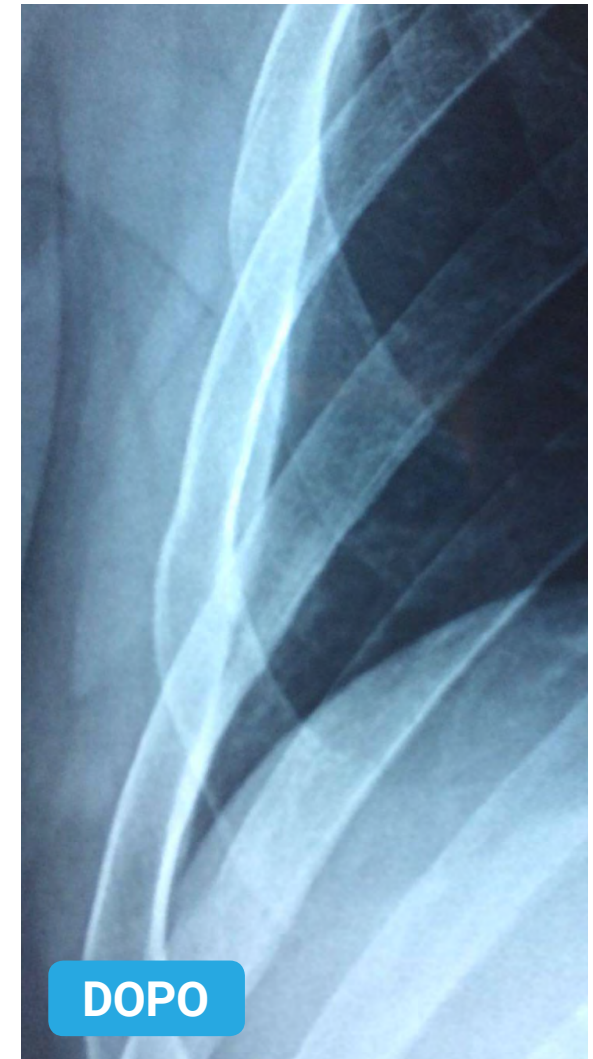

Trattamento con ENF Terapia di frattura composta del radio.

Paziente: Uomo, 53 anni
Professionista: Dr. Giuseppe Notarangelo - Mede (Pavia)
Trattamento: 7 sedute



Trattamento ENF:

Terapia Libera con il trattamento "Rigenerante Osteotendineo".

Conclusioni:

In seguito all'ENF Terapia, si può notare come i tempi classici del processo di consolidamento di frattura siano stati dimezzati.

Trattamento con ENF Terapia di ernie lombo-sacrali.

Paziente: Uomo, 50 anni
Professionista: Dott. Fabian Pastorino - Ponzano Veneto (TV)
Trattamento: 20 sedute in 4 mesi, di cui 6 nelle prime 2 settimane

Trattamento ENF:

Terapia Libera con i trattamenti "Antinfiammatorio Cronico", "Rigenerante Osteotendineo" e "Drenante Superficiale" associato a massoterapia. Tempo di trattamento: 15 minuti.

Conclusioni:

All'inizio del trattamento il paziente non deambulava. Dopo le prime 3 sedute di ENF Terapia, il paziente ha ripreso a camminare e la sintomatologia dolorosa era minima, successivamente ha riacquisito tono muscolare ed è migliorato il quadro dell' RNM e si è risolta la sintomatologia dolorosa.



Trattamento con ENF Terapia di frattura del radio e lesione della metafisi.

Paziente: Bambina, 10 anni
Professionista: Dr.ssa Silvia Milani - Carpenedolo (Brescia)
Trattamento: 3 sedute



Trattamento ENF:

Terapia Libera con i trattamenti "Antinfiammatorio Cronico", "Rigenerante Osteotendineo" e "Drenante Superficiale".

Conclusioni:

All'inizio del trattamento la paziente accusava dolore durante l'uso delle dita. Dopo la prima seduta ENF la sintomatologia dolorosa era diminuita. La radiografia di controllo mostra la risoluzione del problema e la metafisi senza calcificazioni. Utilizzato il tutore per una settimana.

Trattamento con ENF Terapia di trauma da caduta in ambito sportivo.

Paziente: Ragazza, 26 anni
Professionista: Dott. Giovanni Caputo - Ozzano (BO)
Trattamento: 1 seduta



Trattamento ENF:
Terapia Libera con il trattamento "Drenante Superficiale".

Conclusioni:
Dopo 5 giorni dall'unico trattamento di ENF Terapia, si vede il completo riassorbimento dell'ematoma.

Trattamento con ENF Terapia di post-intervento di ricostruzione completa del tendine d'Achille, su ferita cronica non suppurativa con tessuto di granulazione.

Paziente: Uomo
Professionista: Dott. Dario Urzi - Padova
Trattamento: 6 sedute

Trattamento ENF:

Terapia Libera con i trattamenti "Rigenerante Osteotendineo" e "Drenante Superficiale".

Conclusioni:

Dopo 3 sedute di ENF Terapia, il paziente ha potuto mantenere il tallone in immersione prolungata in acqua calda per ammorbidire i tessuti della regione calcaneare e rimuovere l'abbondante strato corneo accumulato. Nella quarta seduta il tessuto di granulazione è completamente scomparso con assenza assoluta di edema e di trasudato e ben avviato processo di guarigione.

Alla sesta seduta si è giunti alla completa risoluzione.



Trattamento con ENF Terapia di infiammazione cronica con aderenza del tendine del flessore superficiale del 4° dito della mano sinistra.

Paziente: Uomo
Professionista: Dott. Dario Urzi - Padova
Trattamento: 5 sedute in 13 giorni

Trattamento ENF:

Terapia Libera con i trattamenti "Antinfiammatorio Cornico" e "Drenante Superficiale".

Conclusioni:

Dopo una settimana dall'ultima seduta di ENF terapia, oltre alla completa disinflammazione, si è ottenuto un netta diminuzione della componente aderenziale ed una scomparsa quasi completa del dolore che compare solo nei gradi estremi di flessione forzata del 4° dito, con ripristino dei movimenti di flessione. Precedentemente erano state eseguite alcune infiltrazioni di cortisone e anestetico locale senza che ciò portasse a significativi e stabili miglioramenti.



Trattamento con ENF Terapia di contusione arto inferiore destro con ematoma evidente.

Paziente: Donna, 50 anni
Professionista: Fisioterapista Brescianini Fabrizio D.O. Monza (MB)
Trattamento: 3 sedute in una settimana.

Trattamento ENF:

Terapia Libera con i trattamenti "Drenante Superficiale", "Drenante Profondo" ed il protocollo ENF Studio "Ematoma" associato a Kinesio Taping.



Conclusioni:

All'inizio del trattamento la paziente presentava una contusione all'arto con ematoma evidente. Dopo 3 sedute di ENF Terapia si nota come l'ematoma si sia velocemente riassorbito. La paziente ha riferito la scomparsa del dolore fin dalla prima seduta.



Trattamento con ENF Terapia di post-intervento frattura Femore con ematoma evidente.

Paziente: Uomo, 99 anni
Professionista: Fisioterapista Dr. Stefania Corbino
Pomezia (Roma)
Trattamento: 3 sedute in 8 giorni.

Trattamento ENF:

Terapia Libera con i trattamenti
“Antinfiammatorio Cronico” e “Drenante
Superficiale”.



Conclusioni:

Il paziente è stato sottoposto ad intervento per sintesi della frattura del Femore con chiodo endomidollare conseguente ad osteoporosi. Dopo 3 sedute di ENF Terapia si nota come l'ematoma si sia significativamente riassorbito.



Trattamento con ENF Terapia di contrattura muscolare lombare dolorosa “Colpo della strega”.

Paziente: Uomo
Professionista: Osteopata DO Alex Ferrini - Rimini
Trattamento: 1 seduta




Trattamento ENF:

Terapia Libera con il trattamento “Decontratturante Muscolare”. Trattamento in dinamica: durante l'esecuzione della terapia il paziente flette la schiena guidato dal terapista.

Conclusioni:

Dall'anamnesi del paziente risulta una vecchia rottura a manico di secchio del menisco mediale del ginocchio sx. Nella risonanza magnetica emergere piccola ernia laterale sx tra L5/S1. Prima del trattamento il paziente non riesce a flettere la schiena.

Già dopo la prima seduta di ENF Terapia si nota come la flessione sia nettamente migliorata.

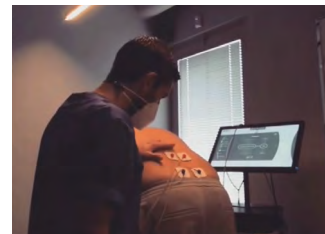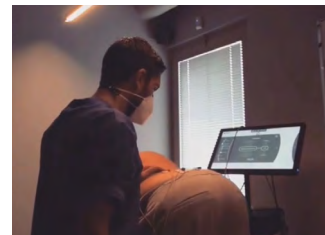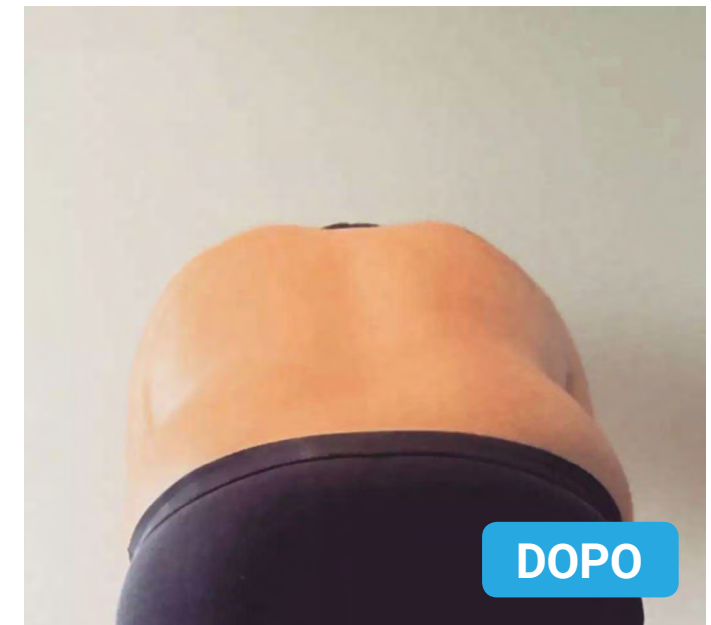**PRIMA****DOPO**

Trattamento con ENF Terapia di cicatrice post-intervento protesi totale di ginocchio.

Paziente: Uomo, 63 anni
Professionista: Fisioterapista Elena Rametti, Villadossola (Verbania)
Trattamento: 3 sedute in 7 giorni.

Trattamento ENF:

Terapia Libera con i trattamenti "Drenante Superficiale", "Aderenze Post-operatorie" e "Rigenerante Tessuti Molli".



Conclusioni:

In fase iniziale la cicatrice presentava alcuni punti non ben cicatrizzati ed ipersensibili. Già dal secondo trattamento si nota un miglioramento della cicatrizzazione ed un assottigliamento della cute.

Al terzo trattamento si rileva un miglioramento della sensibilità; la cicatrice appare più omogenea e schiarita.

Trattamento con ENF Terapia di atteggiamento posturale posteriore.



Paziente: Ragazzo, 16 anni
Professionista: Osteopata Alex Grassi Voghera (Pavia), Italia
Trattamento: 3 sedute a giorni alterni in una settimana.

Trattamento ENF:

5 min. in Terapia Libera con trattamento "Antinfiammatorio Cronico". Sonda ENF 2Sfere Maxi sui muscoli paravertebrali.
20 min. in Protocolli con "Rilassamento Posturale". Sonda ENF Total Body.
5 min. in Terapia Libera con trattamento "Drenante Superficiale". Sonda ENF 2Sfere Maxi sui muscoli paravertebrali.

Conclusioni:

Già dopo la prima seduta si evidenzia un netto miglioramento posturale che prosegue anche nelle due successive.

Trattamento con ENF Terapia di flebite arto inferiore.

Paziente: Donna, 78 anni
Professionista: Maurizio Galeotti - Varese (VA), Italia
Trattamento: 1 seduta



Trattamento ENF:

Protocollo "Linfedema Arto Inferiore" con ENF Studio ripetuto due volte consecutivamente.

A fine trattamento è stato applicato ossido di zinco sulla cute.

Conclusioni:

In seguito ad una singola seduta si evidenzia la riduzione del gonfiore. La paziente percepisce una sensazione di leggerezza ed ha riferito un miglioramento della qualità del sonno non riscontrando più bruciore nell'arto.

Trattamento con ENF Terapia di paramorfismo.

Paziente: Donna, 46 anni
Professionista: Osteopata Alex Grassi
Voghera (Pavia), Italia
Trattamento: 2 sedute

Trattamento ENF:

Terapia Libera con trattamento “Decontratturante” su tutti i muscoli paravertebrali e con trattamento “Antinfiammatorio Cronico” sulle vertebre con maggior impedenza. Sonda ENF 2Sfere

Conclusioni:

Dalle fotografie si evidenzia un evidente miglioramento posturale dopo due sole sedute di ENF Terapia.



Trattamento con ENF Terapia di dito a scatto.



Watch the full video

<https://www.youtube.com/watch?v=-4Y0Jo-Qtvs>


Paziente: Donna, 55 anni
Professionista: Dr.ssa Silvia Milani
Carpenedolo (Brescia)
Trattamento: 1 seduta

Trattamento ENF:


Protocollo cronico "Dito a Scatto (Mano)"
con ENF Studio. Durata del protocollo 15 min.

Conclusioni:

In seguito ad una singola seduta di ENF Terapia si evidenzia il miglioramento della condizione della guaina sinoviale che circonda il tendine ed il recupero della funzionalità articolare. Il paziente inoltre riferisce la scomparsa del dolore.

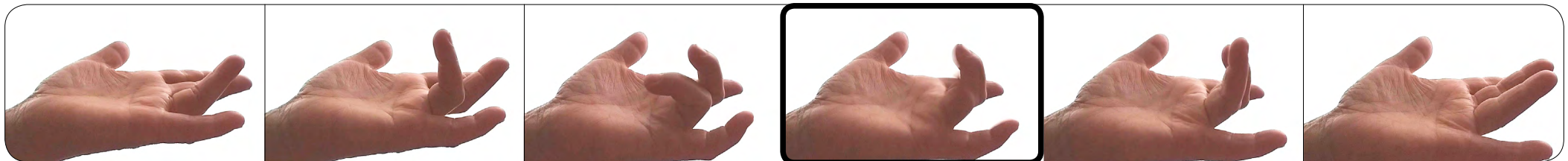

PRIMA

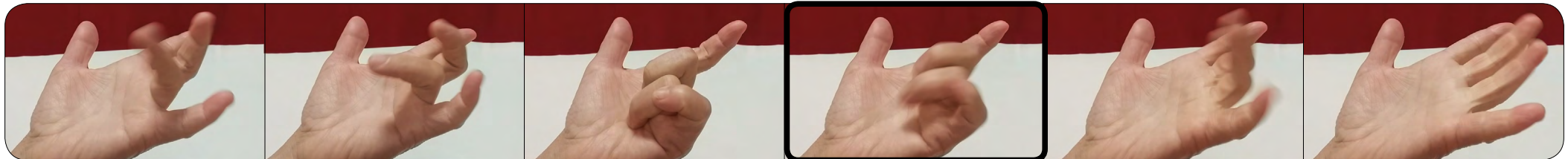

DOPO

Trattamento con ENF Terapia di cicatrice taglio cesareo e smagliature post parto.

Paziente: Donna, 32 anni
Professionista: Giusy Billitti su prescrizione medica Gualtieri (Reggio Emilia), Italia
Trattamento: 2 sedute

Trattamento ENF:

Terapia Libera con "Aderenze Post-operatorie" su cicatrice con sonda Mini per 10 minuti.
Successivamente Protocollo "Addome - Dimagrante" con calze conduttive e Magic Hand.

Conclusioni:

La cicatrice si presentava arrossata ai bordi, non completamente cicatrizzata sui punti di sutura esterna, turgida e poco mobile. Dopo la seconda seduta di ENF Terapia, le estremità risultano cicatrizzate, il colore roseo ed è notevolmente più morbida al tatto. Il protocollo sull'addome ha portato ad un'evidente schiaritura su tutte le smagliature dell'addome.



Trattamento con ENF Terapia di ematoma da contusione.

Paziente: Donna, 31 anni
Professionista: Dr.ssa Silvia Milani - Carpenedolo (Brescia), Italia
Trattamento: 1 seduta



Trattamento ENF:


Protocollo cronico "Ematoma (Coscia)"
con ENF Studio.

Conclusioni:

In seguito ad una sola seduta di ENF Terapia si evidenzia il miglioramento della condizione in relazione al veloce cambio di colore del versamento sanguigno.

Trattamento con ENF Terapia di rughe e risollevamento facciale.

Paziente: Donna, 75 anni
Professionista: Alessandro Maria Caridi, Fisioterapista - Lucerna, Svizzera
Trattamento: 1 seduta

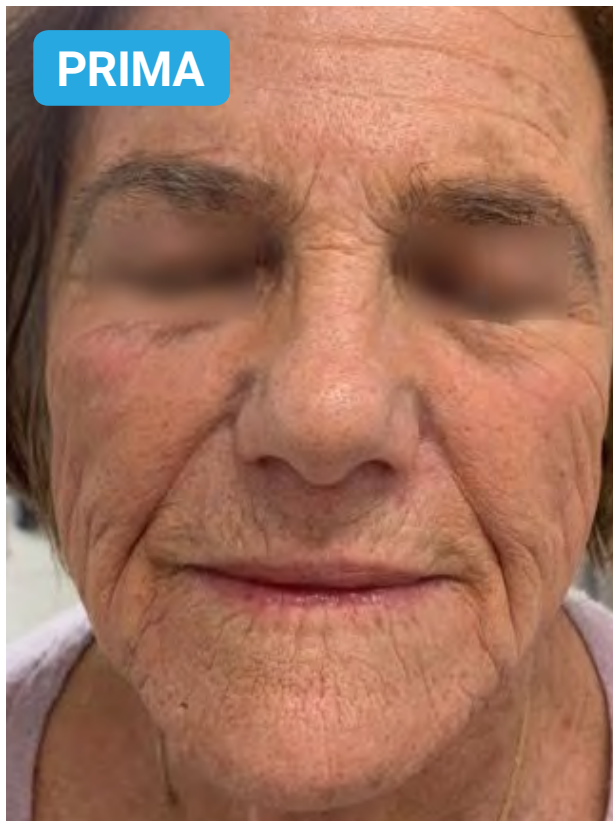

Trattamento ENF:

Terapia Libera con "Drenante Linfatico" per 2 minuti. Successivamente Protocollo "Viso - Lifting" con sonda ENF2 Sfere Maxi combinato all'acido ialuronico per 18 minuti.

Conclusioni:

L'incarnato si presentava grigio e mostrava rughe ben evidenti. In seguito ad una sola seduta di ENF Terapia, la pelle risulta luminosa, i tessuti risollevati ed i segni del tempo sono notevolmente attenuati.

Trattamento con ENF Terapia di esiti protesi totale di ginocchio.

Paziente: Donna, 75 anni
Professionista: Alessandro Maria Caridi,
Fisioterapista - Lucerna, Svizzera
Trattamento: 9 sedute in 8 settimane

Trattamento ENF:

Terapia Libera con i trattamenti "Aderenze Post-Operatorie" e "Rigenerante Tessuti Molli" combinati ai Protocolli Dermatofunzionali di "Cicatrice Immatura" e "Cicatrice Atrofica".

Conclusioni:

In seguito all'operazione, l'articolazione era limitata nei movimenti ed ipersensibile. Dopo la Terapia ENF il paziente riferisce di non avere alcun timore ad estendere anteriormente il ginocchio e di riuscire a caricare il 100% sull'articolazione senza l'uso delle stampelle. Si nota inoltre un veloce e corretto processo di cicatrizzazione della ferita.



Trattamento con ENF Terapia di ustione.

Paziente: Uomo, 64 anni
Professionista: Alessandro Maria Caridi, fisioterapista sportivo - Lucerna, Svizzera
Trattamento: 3 sedute in 10 giorni



Trattamento ENF:


Protocollo dermatofunzionale
"Ustione di Primo Grado"
con ENF Studio Beauty.

Conclusioni:

Dalle immagini si nota come il Trattamento ENF abbia notevolmente schiarito le macchie da ustione influenzando positivamente anche i tessuti mio-fasciali sottostanti. Inoltre, il paziente riferisce una sensazione di leggerezza a livello toraco-scapolare.

Trattamento con ENF Terapia di Paralisi di Bell.

Paziente: Donna, 66 anni
Professionista: Dott. Antonio Lancia, Masso-fisioterapista - Arce (Frosinone)
Trattamento: 9 sedute in 9 giorni

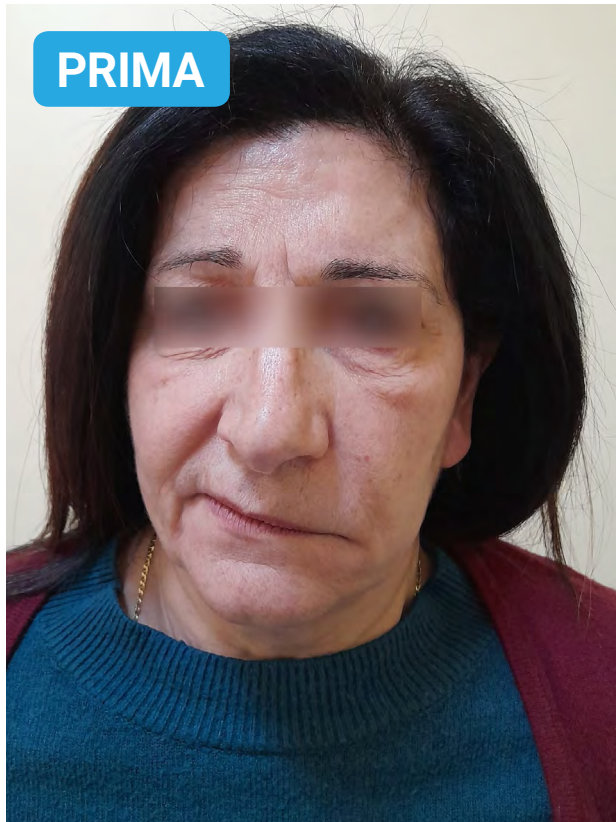

Trattamento ENF:

Terapia Libera con i trattamenti "Decontratturante", "Antispastico", "Rigenerante Tessuti Molli" e "Drenante Superficiale" associati a terapia manuale.

Conclusioni:

Dalle immagini si evidenzia come eseguire il trattamento ENF + trattamento manuale fin da subito porti ad ottenere risultati veloci insieme alla terapia farmacologica.

Trattamento con ENF Terapia di Paralisi di Bell.





Paziente: Donna, 46 anni
Professionista: Dott. Antonio Lancia,
Masso-fisioterapista, Priverno (Latina)
Trattamento: 11 sedute a giorni alterni

Trattamento ENF:

Terapia Libera con i trattamenti "Decontratturante", "Antispastico", "Rigenerante Tessuti Molli" e "Drenante Superficiale" associati a terapia manuale.

Conclusioni:

Dalle immagini si evidenzia come eseguire il trattamento ENF + trattamento manuale fin da subito porti ad ottenere risultati veloci insieme alla terapia farmacologica.

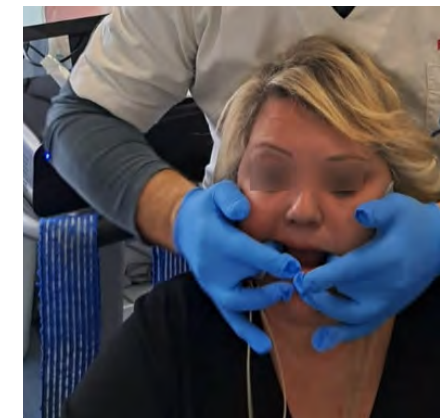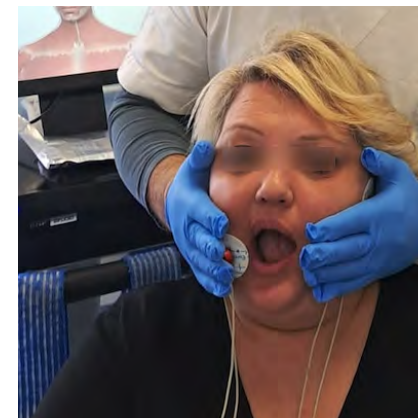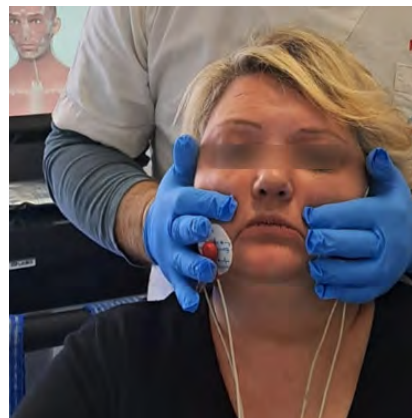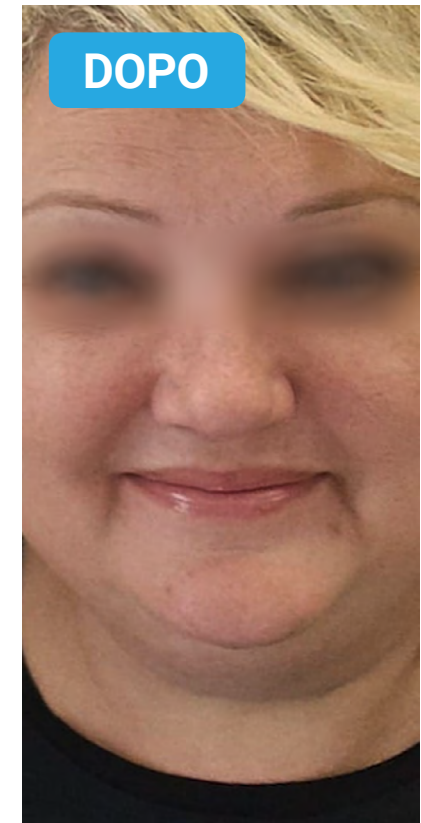

Trattamento con ENF Terapia di Paralisi di Bell.

Paziente: Donna, 69 anni
Professionista: Dott. Antonio Lancia, Masso-fisioterapista - Arce (Frosinone)
Trattamento: 11 sedute in 11 giorni



Trattamento ENF:

Terapia Libera con i trattamenti "Decontratturante", "Antispastico", "Rigenerante Tessuti Molli" e "Drenante Superficiale" associati a terapia manuale.

Conclusioni:

La Paralisi di Bell inizialmente è stata trattata da professionisti e/o struttura con terapia manuale con scarsi risultati. Dopo 2 mesi la paziente ha iniziato i trattamenti ENF ottenendo risultati.

Trattamento con ENF Terapia di contrattura dei muscoli paravertebrali e del gran dorsale con blocco di una scapola.

Paziente: Uomo, 50 anni
Professionista: Rossetti Marco, Massaggiatore sportivo
Mantova, Italia
Trattamento: 1 seduta



Trattamento ENF:

Terapia Libera con "Scansione Digitale", trattamenti "Drenante Superficiale" con sonda 4Gel, "Rigenerante Osteotendineo" e "Rigenerante Tessuti Molli" con sonda SfereMaxi ed "Antinfiammatorio Acuto" con sonda 4Gel. Trattamento ENF associato a coppettazione, manipolazione e kineesiotape per mantenere nei giorni seguenti il tono muscolare regolare.

Conclusioni:

Il paziente lamentava dolore al dorso dovuto ad un movimento repentino sul luogo di lavoro e non era a conoscenza della sua condizione posturale e delle curve della colonna vertebrale. Dopo il trattamento ENF, non sentiva più dolore e percepiva un senso di leggerezza.

Trattamento con ENF Terapia di grani di miglio.

Paziente: Donna, 23 anni
Professionista: Roberta Tanase - Osteopata e massoterapista, Calvisano (BS), Italia
Trattamento: 1 seduta

Trattamento ENF:

Terapia Libera con i trattamenti "Antinfiammatorio Pronto Intervento" 3min., "Drenante Superficiale" 3 min. e "Rigenerante Tessuti Molli" 3 min.


Conclusioni:

La paziente lamentava fastidio alla palpebra dovuto ad un grano di miglio (piccola cisti epidermica che contiene cheratina). In seguito ad una sola seduta di ENF Terapia è avvenuta la rottura della ciste con fuoriuscita del liquido contenuto ed il conseguente sgonfiamento.



Trattamento con ENF Terapia di post-intervento estrazione e implantologia dentale.

Paziente: Donna, 68 anni
Professionista: Roberta Tanase - Osteopata e massoterapista, Calvisano (BS), Italia
Trattamento: 6 sedute in 4 giorni

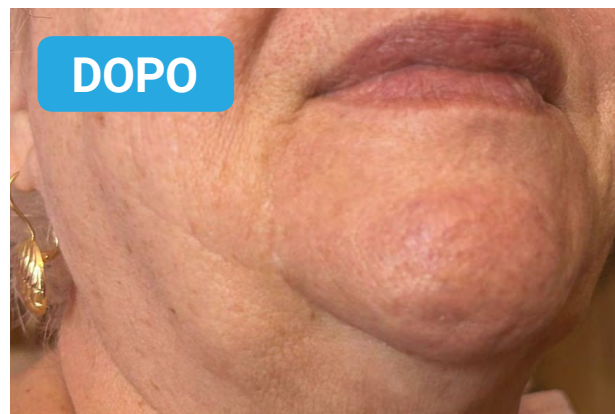

Trattamento ENF:

Terapia Libera con i trattamenti "Antinfiammatorio Cronico", "Drenante Profondo" e "Rigenerante Tessuti Molli" utilizzando la sonda ENF Sfere Maxi e gli elettrodi Gel.

Conclusioni:

La prima seduta di terapia ENF è stata eseguita subito dopo l'intervento e poi ripetuta il mattino e la sera dei giorni successivi. Dalle immagini si nota come il gonfiore e gli ematomi si siano completamente risolti. Inoltre, la paziente non riferisce più dolore.

Trattamento con ENF Terapia di post-intervento ginocchio - ricostruzione del Tendine Rotuleo.

Paziente: Uomo, 34 anni
Professionista: Dott. Fisioterapista Romano De Santis
Picinisco (Frosinone), Italia
Trattamento: 20 sedute



Trattamento ENF:

Nella prima fase, Terapia Libera con i trattamenti “Drenante Profondo” e “Rigenerante Osteo-tendineo” utilizzando la sonda ENF Mini in modalità statica e dinamica. Nella seconda fase, aggiunto il trattamento “Trofismo Muscolare” e utilizzando gli elettrodi Gel.

Conclusioni:

I trattamenti ENF sono iniziati subito dopo l'intervento di ricostruzione plastica al Tendine Rotuleo a causa di un trauma calcistico. Dopo 45 giorni si è inserito alla Terapia ENF il trattamento funzionale in palestra riabilitativa e poi sul campo. Dopo soli 4 mesi il paziente è ritornato completamente all'attività sportiva.

Trattamento con ENF Terapia di post-intervento estetico di Liposuzione.

Paziente: Donna, 30 anni
Professionista: Alessandro Maria Caridi, Fisioterapista
Lucerna, Svizzera
Trattamento: 7 sedute in 15 giorni



Trattamento ENF:

Terapia Libera con i trattamenti "Antinfiammatorio Cronico", "Drenante Superficiale" e "Rigenerante Tessuti Molli". Dalla quinta seduta inserito "Decontratturante Muscolare" per trattare i tessuti tesi sulla zona posteriore della coscia con i guanti conduttivi della sonda ENF Magic Hand. Durata totale di trattamento 40 min., (20 min. per gamba)

Conclusioni:

In seguito alla Terapia ENF post-intervento estetico di rimozione del tessuto adiposo si nota un miglioramento del 90% della rigidità tissutale e miofasciale. Inoltre si evidenzia la totale assenza di cicatrici e dolore riferito dalla cliente.

Trattamento con ENF Terapia di post-intervento di frattura del Femore.



Paziente: Donna, 84 anni
Professionista: Maurizio Galeotti
Varese (VA), Italia
Trattamento: 30 sedute

Trattamento ENF:

Terapia Libera con i trattamenti "Antinfiammatorio Cronico", "Rigenerante Osteotendineo", "Antalgico Grave" e "Drenante Superficiale con sonda ENF 2Maxi. In seguito ad un'ecografia di controllo è stato aggiunto "Aderenze Post-operatorie".

Conclusioni:

A distanza di 6 mesi dall'operazione di Frattura del collo del Femore, la paziente riferiva dolore in corrispondenza della vite inserita lungo il femore la quale le aveva creato una lacerazione all'interno del muscolo Adduttore Lungo. In seguito alla Terapia ENF si nota il rimodellamento osseo con cicatrizzazione del tessuto lacerato.

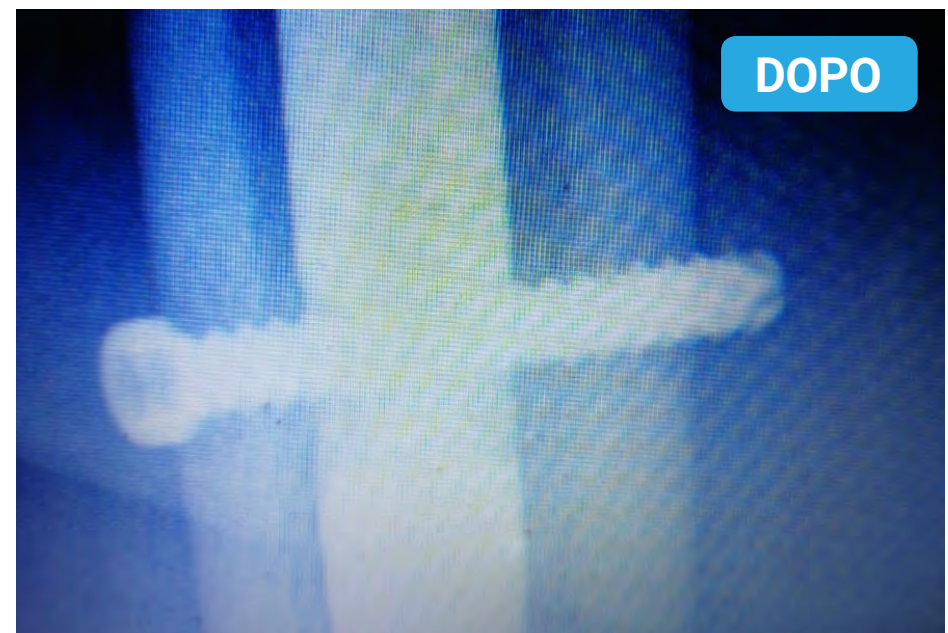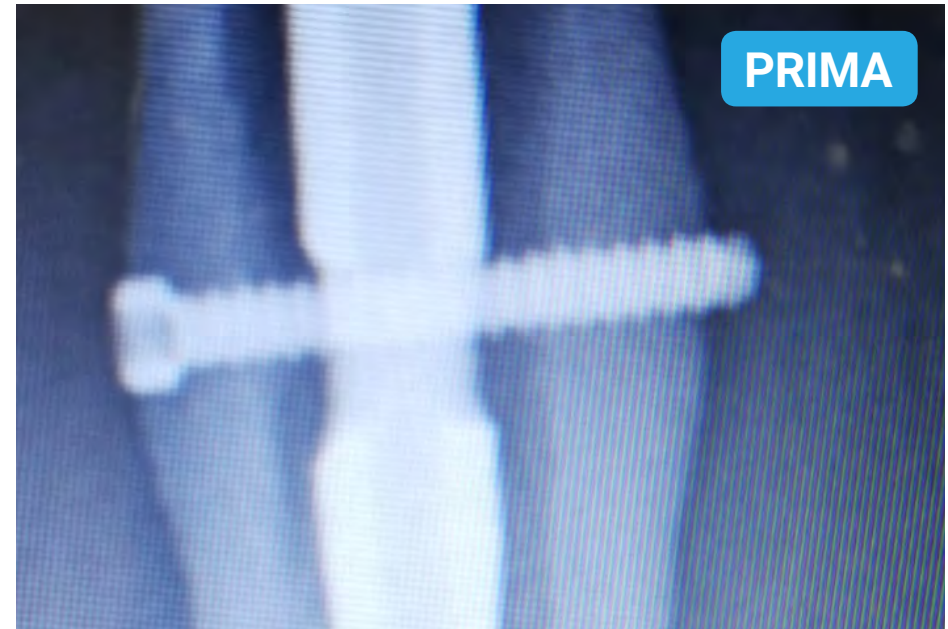

Trattamento con ENF Terapia di vescica da ustione.

Paziente: Donna, 26 anni
Professionista: Dott.ssa Silvia Milani - Fisioterapista
Carpenedolo (BS), Italia
Trattamento: 3 sedute

Trattamento ENF:

Terapia Libera con i trattamenti "Antinfiammatorio Pronto-intervento" 5 min. e "Rigenerante Tessuti Molli" 5min. utilizzando la sonda ENF 2Gel.

Conclusioni:

In seguito al contatto con liquido bollente la paziente ha riportato diverse piccole ustioni.

Dopo sole 3 sedute di ENF Terapia si nota la completa rigenerazione della pelle in corrispondenza di una vescica da ustione nella zona sensibile del décolleté.



Trattamento con ENF Terapia di ustioni da trattamento estetico di epilazione laser.

Paziente: Donna, 38 anni
Professionista: Dott.ssa Silvia Milani - Fisioterapista, Carpenedolo (BS), Italia
Trattamento: 3 sedute



Trattamento ENF:


Terapia Libera con i trattamenti "Antiinfiammatorio Cronico", "Rigenerante Osteotendineo" e "Drenante Superficiale" utilizzando la sonda 4Gel.

Conclusioni:

In seguito alla Terapia ENF si nota come le diverse ustioni dovute ad un trattamento estetico di epilazione laser siano notevolmente migliorate.

Trattamento con ENF Terapia di artrite reumatoide.

Paziente: Donna, 70 anni
Professionista: Emanuele Lunardini - Massoterapista, Capannori (LU), Italia
Trattamento: 1 seduta

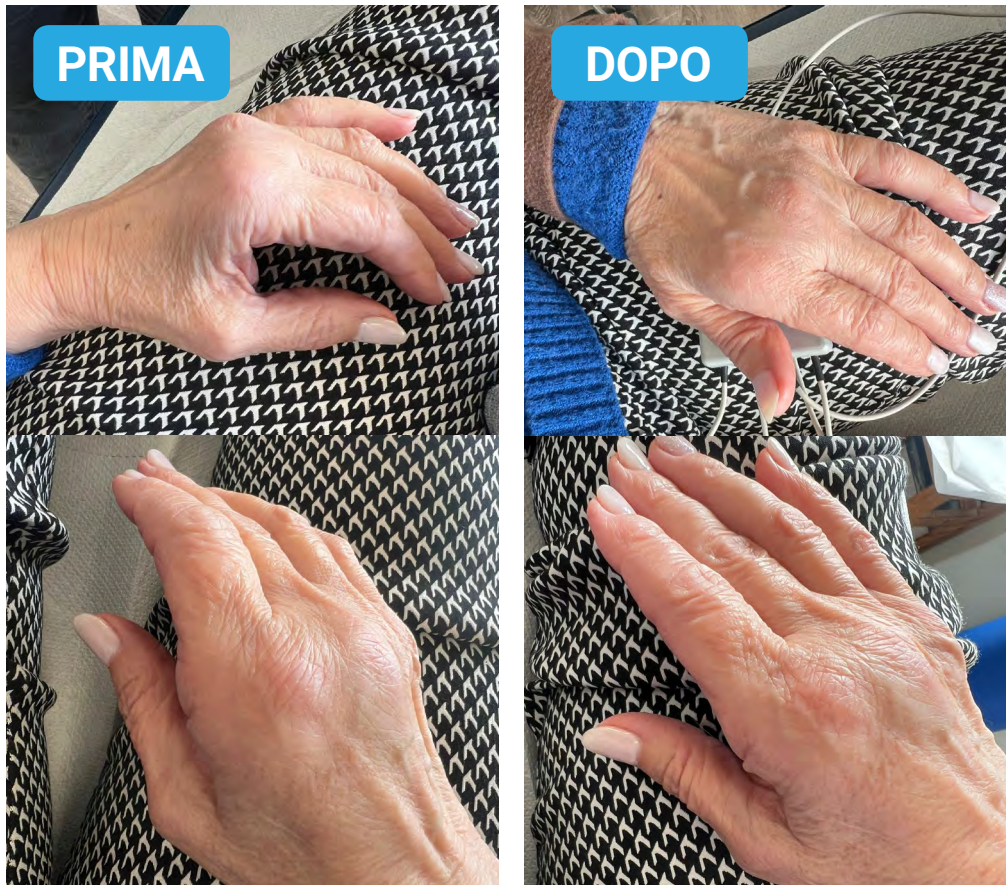

Trattamento ENF:
Protocollo "Artrite Reumatoide"
con ENF Studio.

Conclusioni:
In seguito al Trattamento ENF si nota il miglioramento delle funzionalità delle mani con evidente riduzione del gonfiore e dolore delle articolazioni coinvolte, sintomi comuni in pazienti affetti artrite reumatoide.