

ENF Pro

**Il nuovo arrivato
nella famiglia ENF**



Modulo

Fisioterapia

Il Dispositivo Medico ideale per la Fisioterapia professionale

ENF Pro è un Dispositivo Medico professionale portatile, concepito per soddisfare le principali esigenze in Fisioterapia. Utilizza la raffinata Elettroterapia Adattiva ENF, che modula in tempo reale l'emissione di impulsi elettrici al variare dell'impedenza cutanea. Pratico, trasportabile, configurabile con vari moduli software, è il Dispositivo Medico ideale per il Professionista che desidera ottenere grandi soddisfazioni.



Sonde
ENF Pro




Borsa
ENF Pro



METODO IOP 1-4

1 sintomo → 4 percorsi

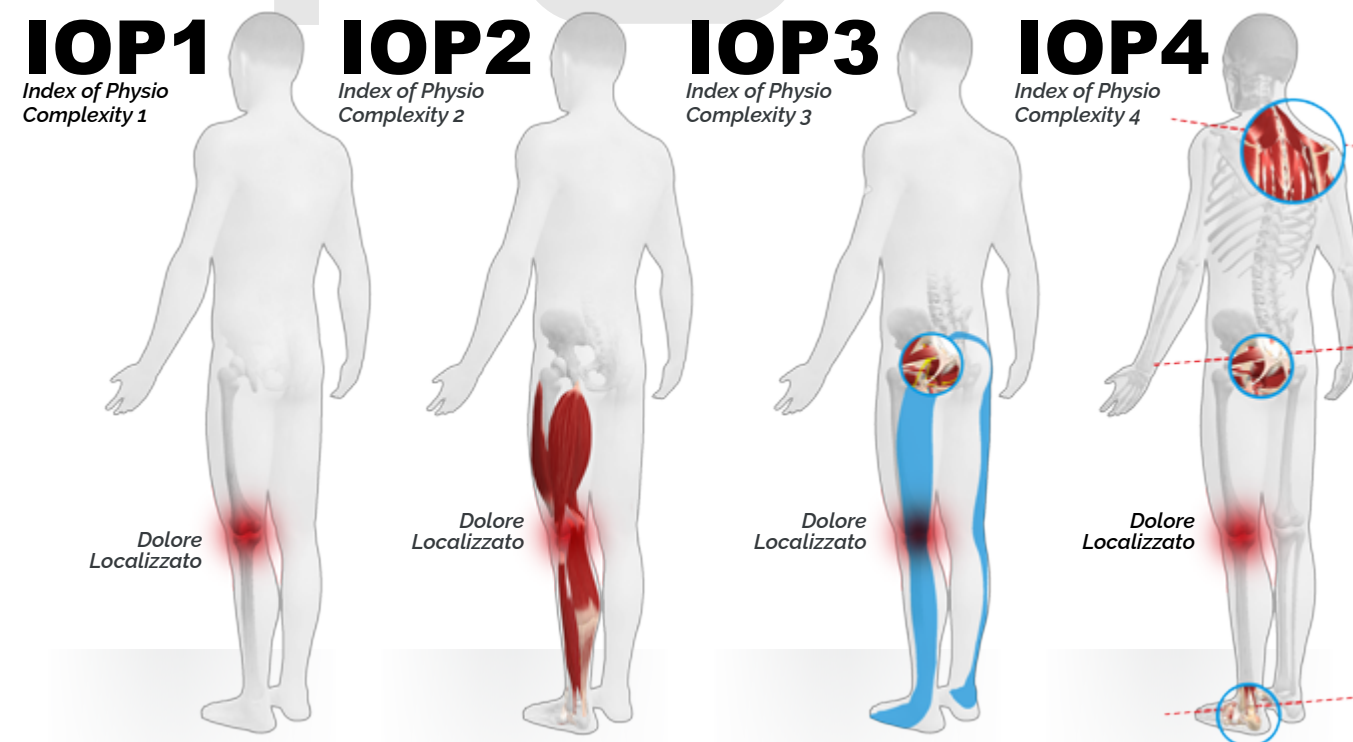

Valutazione locale Trattamento sintomatico

Terapia eseguita sul punto di dolore. Indicata per traumi sportivi, edemi, distorsioni acute, lesioni tendinee, strappi muscolari.

Valutazione dinamica Trattamento muscolo-articolare

Terapia eseguita sui muscoli agonisti ed antagonisti responsabili del movimento. Indicata per patologie legate alla limitazione della mobilità articolare.

Valutazione del dermatomero Trattamento multifattoriale

Terapia eseguita lungo il dermatomero, in zone neurologicamente correlate al sintomo. Indicata per patologie neuro-muscolari.

Valutazione generale Trattamento posturale

Terapia eseguita in tutti i casi in cui lo squilibrio oltrepassa la logica dermatomerica. Indicata per patologie posturali e della colonna vertebrale.

Tratta le principali patologie riducendo i tempi di recupero

ENF Pro è dotato di sonde specifiche da applicare seguendo le indicazioni dei protocolli software. ENF Pro offre al professionista tre grandi vantaggi:

- poter trattare con un unico Dispositivo Medico le principali patologie in fisioterapia,
- poter individuare i punti di trattamento applicando il METODO ENF 1-4,
- poter ridurre i tempi di recupero combinando tra loro i trattamenti Antinfiammatorio Acuto e Cronico, Drenante Superficiale, Drenante Profondo, Drenante Linfatico, Rigenerante Tessuti Molli, Rigenerante Osteotendineo, Aderenze Post-Operatorie, Decontratturante, Tono e Trofismo Muscolare.

Modulo

Fisioterapia dello Sport



Riabilitazione sportiva in tempi record

ENF Pro è un Dispositivo Medico professionale con modulo software dedicato e sonde specifiche per il trattamento delle principali patologie in Fisioterapia dello sport. Facilmente trasportabile, è utilizzabile con alimentazione da rete o con batterie interne che garantiscono 3 ore di autonomia. E' il dispositivo ideale per il lavoro in Studio, in palestra, in trasferta.

La terapia ENF resa semplice e veloce

Grazie all'impiego dell'Elettroterapia Adattiva, che in tempo reale modifica la quantità e la velocità di emissione di impulsi elettrici al variare dell'impedenza cutanea, si ottengono grandi risultati riducendo velocemente i tempi di recupero. Nella cura degli infortuni con ENF Sport, i tradizionali e lenti protocolli R.I.C.E. possono essere facilmente superati. La tempestività di intervento con ENF aumenta la qualità del risultato: quanto prima si applica sulla zona lesa, tanto è maggiore la velocità di recupero.

Sonde
ENF Pro



Borsa
ENF Pro

2 ORE
DI AUTONOMIA



Esegui trattamenti anche
durante la trasferta

Un Dispositivo Medico versatile e potente

Con ENF Pro il trattamento si applica scegliendo tra Terapia Libero oppure applicando uno tra i Protocolli predefiniti resi disponibile dal Software. Ciò consente al fisioterapista o al massaggiatore sportivo di trattare una gamma completa di condizioni patologiche, scegliendo ad esempio tra effetto decontratturante, antinfiammatorio, drenante, rigenerazione dei tessuti molli o osteo-tendinei, aderenze post-operatorie.

Accessorio giusto al momento giusto

ENF Pro è dotato di accessori specifici, alcuni dei quali consentono un trattamento automatico indipendente dall'operatore. Una seduta di ENF terapia può essere eseguita in modo statico o dinamico ed associata con grande efficacia alla Terapia Manuale, al trattamento Osteopatico, all'applicazione del Tape, senza particolari effetti collaterali indesiderati. La sua caratteristica polivalenza lo rende un Dispositivo Medico ideale per tutte le patologie tipiche della riabilitazione sportiva.



Modulo

Osteopatia

Osteopatia come Filosofia


Prima ancora di essere una terapia manuale l'Osteopatia è un modo di pensare alla salute della persona.

1. La persona è un'unità di corpo, mente e spirito.
2. Il corpo è capace di autoregolazione, di autoguarigione e di conservazione della salute.
3. La struttura determina la funzione, entrambi sono in relazione reciproca.
4. La malattia non è una causa ma un effetto della disfunzione.

L'Osteopatia è una filosofia che raccoglie un insieme di tecniche manuali e strumentali per ricreare il normale equilibrio di forma e funzione della buona salute.

E' questa visione che rende l'Osteopatia così potente ed affascinante.

Protocollo
ENF + THRUST

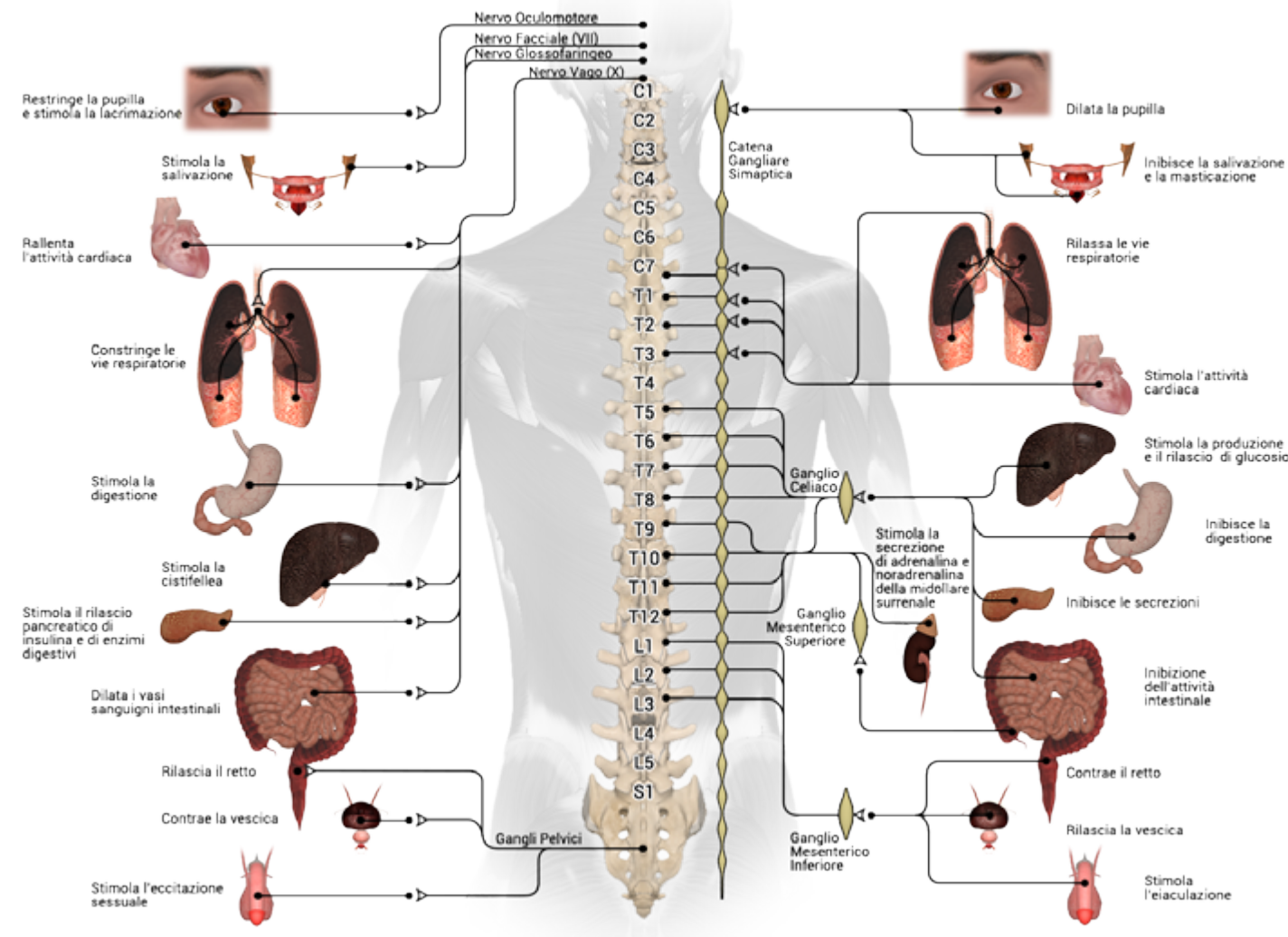

Tecniche Strutturali

Tecniche Cranio-Sacrali

Tecniche Viscerali Fasciali

Tecniche Neuro Linfatiche

Osteopatia Strumentale ENF

ENF e Osteopatia sono perfettamente combinate tra loro perché governate dagli stessi principi di ricerca e trattamento delle cause e non dei sintomi. E' la stessa visione che governa il buon uso della terapia ENF:

1. **Cerca le zone disfunzionali con l'aiuto della tecnologia ENF:** spesso la causa del dolore trova la sua collocazione lontano dalla zona dolorosa.
2. **Esegui il trattamento ENF:** potente Drenaggio Linfatico, riduzione veloce delle Contratture e gli altri effetti terapeutici ENF sugli arti e sul tronco agevolano l'applicazione delle tecniche Osteopatiche.
3. **Applica la tecnica Osteopatica:** 1+1=3 la perfetta sinergia tra Osteopatia e ENF Terapia premia il professionista che intende perseguire la massima qualità.

Sonde
ENF Pro

Borsa
ENF Pro

Modulo

Pavimento Pelvico

Una parte del corpo da non sottovalutare

Il pavimento pelvico non è un organo ma un prisma romboidale composto da vari elementi anatomici che rappresentano un'unità funzionale importante per la salute ed il benessere della persona. La disfunzione di una delle componenti del pavimento pelvico determina un certo grado di anomalia anche delle altre. Spesso il paziente non ne è consapevole ed i problemi del Pavimento Pelvico vengono ignorati, almeno fino a che il disagio non diviene insopportabile. I disturbi del pavimento pelvico rappresentano un gruppo di patologie che complessivamente assumono notevole rilevanza personale e sociale.

Qualità della vita per la Donna

Le disfunzioni della zona ginecologica sono di solito sottostimate a causa delle barriere di pudore che permangono nella nostra organizzazione sociale. L'impatto sulla qualità della vita di questi disturbi comporta un'alterata autostima ed una limitazione nelle attività quotidiane e nei rapporti interpersonali e relativi alla sessualità. I protocolli ENF permettono di trattare l'incontinenza urinaria migliorando il controllo della vescica, alleviare il dolore pelvico ed accelerare il recupero post parto.

Sonde
ENF Pro



Borsa
ENF Pro



Qualità della vita per l'Uomo


La zona urologica è correlata alla minzione, alla defecazione, alla sessualità. L'integrità degli elementi anatomici del pavimento pelvico risente di alcune condizioni come la sedentarietà prolungata e l'obesità, traumi o interventi chirurgici alla prostata, che possono indebolire la capacità contrattile. Con il trattamento ENF, recuperare il tono dei muscoli del pavimento pelvico e migliorare la risposta neurologica aiuta il paziente a ridurre problemi legati alla prostatite, all'incontinenza, al dolore pelvico.

Perineo: il muscolo più importante del Pavimento Pelvico


Il Perineo è una sottile fascia di tessuto connettivo, che copre, collega e supporta i muscoli e gli organi della regione pelvica tra i quali il muscolo pubococcigeo.

E' il centro energetico del Pavimento Pelvico, situato tra l'ano e gli organi genitali ed è considerato il muscolo più importante poiché circonda ed organizza tre funzioni essenziali: le aperture della vescica, degli organi genitali e del retto.

I protocolli ENF sono studiati specificamente per migliorare il tono di questo muscolo fondamentale che, oltre ad avere funzione di sostegno e di contenimento, è legato alle principali funzioni neurovegetative: sessualità, riproduzione, evacuazione.

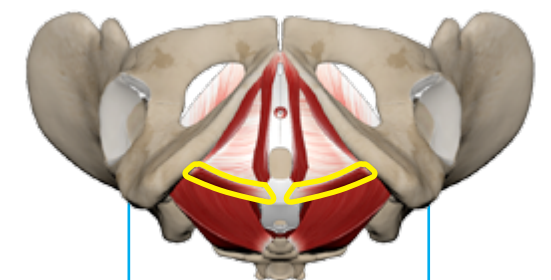

Perineo (Donna)

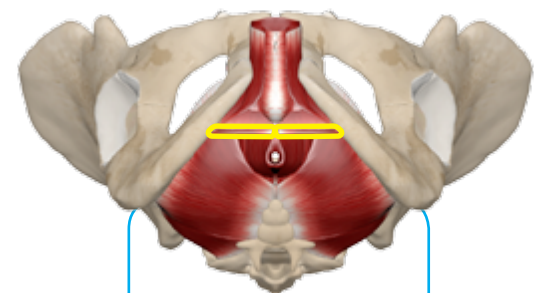

Perineo (Uomo)

Modulo

Podologia

Una tecnologia polivalente per la Podologia

La Podologia tratta tutte le patologie e le problematiche legate alla struttura e alla conformazione del piede. Spesso, la Diagnosi ed il Trattamento di una patologia dei piedi coinvolge la struttura delle caviglie ed è correlate a patologie posturali degli arti inferiori e della schiena. Per questo, è importante che la Podologia di qualità disponga di un dispositivo polivalente come ENF Pro, da applicare nelle situazioni più critiche, con la possibilità di ottenere grande beneficio per il paziente.



Perché la tecnologia ENF è ideale in Podologia?

L'Elettroterapia Adattiva ENF si distingue dalle comuni elettroterapie poiché modula la quantità e la velocità di emissione di impulsi elettrici in funzione del cambiamento dell'impedenza cutanea. Questa caratteristica le permette di interagire con il S.N. Periferico e di influenzare le parti anatomiche correlate attraverso le terminazioni nervose del piede. Con ENF è possibile ottenere grandi risultati terapeutici sia sulle alterazioni di muscoli, tendini ed ossa, ma anche sull'apparato vascolare e linfatico del piede, sulla condizione generale e locale della cute, su infiammazioni, piaghe ed ulcere con risultati evidenti fin dalla prima seduta.

Protocollo
**Fascite
Plantare**



Velocizzare la soluzione di problemi complessi

La grafica del software e le specifiche sonde in dotazione sono studiati per l'applicazione locale in funzione della condizione patologica da risolvere. I protocolli guidano l'operatore ad una facile applicazione delle sonde. L'obiettivo è velocizzare il miglioramento delle varie condizioni patologiche attraverso la riparazione dei tessuti molli ed osteo-tendinei, la riduzione degli edemi e degli stati infiammatori mediante il posizionamento di elettrodi adesivi in gel o in silicone.

Protocolli ENF

- Artrosi del Piede
- Artrite Reumatoide del Piede
- Borsite Alluce Valgo
- Borsite Quinto Dito Varo
- Borsite Retrocalcaneare
- Distorsione Caviglia
- Entesopatia
- Fascite Plantare
- Metatarsalgia
- Neuroma di Morton
- Piede Diabetico
- Postoperatorio - Alluce Valgo
- Postoperatorio - Dito a Martello
- Postoperatorio - Neuroma di Morton
- Postoperatorio - Piede Piatto
- Postoperatorio - Piede Cavo
- Postoperatorio - Rottura Tendine d'Achille
- Postoperatorio - Tunnel Tarsale
- Spina Calcaneare
- Tendine d'Achille - Calcificazione
- Tendine d'Achille - Lesione Parziale
- Tendine d'Achille - Tendinite

Modulo

Odontoiatria

La tecnologia polivalente per lo studio dentistico

Il Dispositivo Medico ENF Pro offre il vantaggio di una tecnologia polivalente: ogni protocollo è visualizzato graficamente in modo da rendere semplice l'esecuzione del trattamento e l'applicazione delle sonde, offrendo la possibilità di ottenere risultati di eccellenza nei trattamenti post-intervento, nelle problematiche dell'ATM, in Estetica del Viso. Per le sue proprietà intrinseche, la terapia ENF può essere applicata con successo in molte situazioni con grande beneficio per il paziente.

Prendersi cura dell'Estetica del Viso

Con ENF Pro è possibile eseguire trattamenti per il ringiovanimento medico estetico del viso. I Protocolli ENF, di facile applicazione, aiutano a diminuire la lassità cutanea, a rallentare l'invecchiamento della pelle, a ridefinire i contorni delle labbra e ridurre il gonfiore intorno agli occhi. Inoltre, l'azione combinata di ENF e creme contribuisce a rendere più giovane l'aspetto del viso, che è la cornice naturale del sorriso.

Sonde
ENF Pro

Borsa
ENF Pro

Velocizzare la soluzione di problemi complessi

Il software grafico e le specifiche sonde in dotazione sono studiati per l'applicazione locale in funzione della condizione patologica da risolvere. L'obiettivo è di velocizzare il miglioramento di varie condizioni patologiche come la riduzione del dolore ed in particolare la Nevralgia del Trigemino, la riparazione dei tessuti molli e osteo-tendinei, la riduzione degli edemi e degli stati infiammatori.

E' anche possibile raggiungere ottimi risultati nel trattamento delle più ostiche problematiche correlate all'implantologia come le Lesioni reversibili delle terminazioni nervose e la lentezza del processo di Osteointegrazione.

Trattare l'ATM

(articolazione temporo mandibolare)


L'ATM è sorretta e stabilizzata da molti legamenti il cui malfunzionamento spesso determina l'insorgenza di problematiche difficili da risolvere. ENF Pro mette a disposizione un protocollo specifico che può ridurre le problematiche dell'ATM mediante il posizionamento di elettrodi adesivi in gel mono-paziente, con trattamento non dipendente dall'operatore di semplice applicazione.




Trattamento ENF
Post-intervento chirurgico odontoiatrico



Trattamento ENF
Parodontite

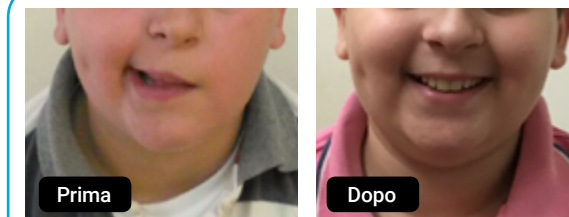

Trattamento ENF
Paresi Nervo Facciale

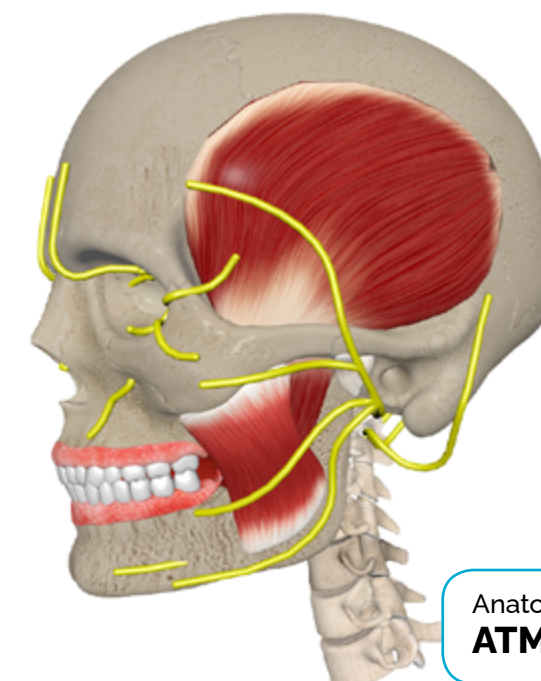

Anatomia
ATM

Modulo

Fisioestetica

Fisioestetica strumentale

Risultati visibili senza effetti collaterali e di grande qualità, grazie all'utilizzo delle speciali sonde ENF Sfere Maxi ed ENF Sfere Mini. Costruite in acciaio ed alluminio, per la loro struttura rigida uniscono la precisione del punto trattato alla possibilità di esercitare una pressione variabile da delicata a forte. Questa caratteristica si rivela molto efficace sia sull'attivazione della tonicità muscolare che nelle problematiche muscolo-tensive.

Trattamenti viso e corpo

Il trattamento ENF aiuta a ridurre gli inestetismi cutanei e sottocutanei. L'azione combinata di ENF e creme contribuisce a rendere più giovane l'aspetto del viso ridefinendo i contorni delle labbra e riducendo il gonfiore intorno agli occhi.

Inoltre, la tecnologia ENF aiuta a ridurre la cellulite ed i suoi inestetismi con lo speciale manipolo a sfere, stimolando l'organismo a raggiungere un effetto snellente e rassodante su addome e glutei.



Sonde ENF
Sfere Maxi
Sfere Mini



Modulo

Massaggio Estetico

Aumenta la potenza delle tue mani

Il massaggio è una tecnica fondamentale per il benessere dei clienti. Per questo abbiamo messo a punto la nuova tecnologia ENF Magic Hand, l'innovativo sistema di massaggio con guanti conduttivi che permette di trasferire la potenza della tecnologia ENF mentre esegui il massaggio manuale. Selezionando il protocollo opportuno con effetto drenante o antiinfiammatorio, si ottengono i maggiori vantaggi nel Linfodrenaggio e nel massaggio miorilassante.



Sonda ENF
Magic Hand

Linfodrenaggio

Grazie alla combinazione del linfodrenaggio manuale e strumentale si possono raggiungere ottimi risultati sul sistema linfatico favorendo il metabolismo corretto. Per eseguire il massaggio in maniera efficace è sufficiente adattare l'utilizzo del Magic Hand alle caratteristiche morfologiche del soggetto in trattamento, alle sue necessità individuali ed alla sua sensibilità.



Moduli software disponibili per ENF Pro:



Fisioterapia



Fisioterapia dello Sport



Osteopatia



Pavimento Pelvico



Podologia



Fisioestetica



Odontoiatria



Massaggio Estetico



ENF

ELETTROTHERAPIA ADATTIVA

Energy

Time

Il suo segreto è il feedback

La forma d'onda ENF cambia al variare dell'impedenza cutanea.

Funzionamento dell'elettroterapia adattiva ENF: la linea blu rappresenta la dinamica della reazione corporea; la linea nera rappresenta la dinamica di emissione ENF come compensazione della risposta corporea. Viene eliminato l'adattamento e notevolmente ampliato il campo dell'azione riabilitativa.



FastTherapies

our brand is our mission

www.fasttherapies.com



Testi e fotografie puramente indicativi.
CE medicale - Procedura di accreditamento
in corso per alcuni prodotti.
Documento informativo per uso interno, v 4.0