




Doctor Tecar **PLUS**





- 01 L'EVOLUZIONE DI UNA METODICA
- 01 KNOW-HOW TECNOLOGICO
- 02 40 ANNI DI INNOVAZIONI
- 03 IL TUO PARTNER NELLO SPORT
- 04 TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA MEDICINA
- 04 PER UNA TERAPIA SICURA ED EFFICACE
- 05 TERAPIA PER EFFETTI
- 06 PERCHÈ SCEGLIERE DOCTOR TECAR PLUS?
- 08 UN UNICO MANIPOLO
- 09 SISTEMA BIOTRANSFER
- 10 TRATTAMENTO IN FASE ACUTA, SUBACUTA E CRONICA
 - 11 Modalità Resistiva
 - 11 Modalità CApacitiva
- 12 PER UNA TERAPIA FLESSIBILE
 - 12 Modalità time/joule
 - 13 Modalità pulsata regolabile
- 14 LA GESTIONE DEL TRATTAMENTO
- 16 MODALITÀ AVX
- 20 MODELLI
- 20 SPECIFICHE TECNICHE
- 20 ACCESSORI

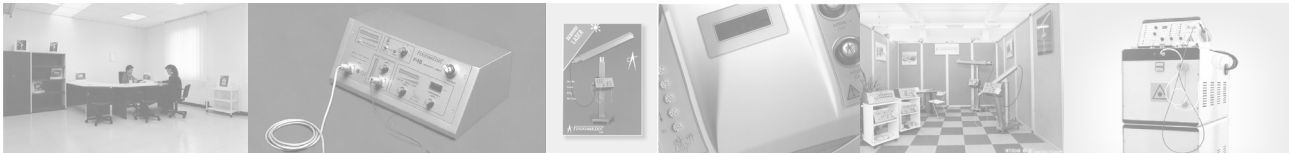

L'EVOLUZIONE DI UNA METODICA

Dal 1986 Mectronic progetta e produce dispositivi per terapia fisica strumentale e con **oltre 23000 dispositivi medicali è leader nel settore per know how ed esperienza.** L'esperienza maturata negli anni, la ricerca continua ed il contatto diretto con terapisti e medici ha permesso a Mectronic di introdurre sul mercato strumenti sempre all'avanguardia, sia per prestazioni che metodo di utilizzo.


Grazie alla continua ricerca tecnologica e terapeutica, Mectronic presenta **Doctor Tecar PLUS**, l'innovativo dispositivo per tecarterapia dedicato alla riabilitazione.

Doctor Tecar PLUS è uno strumento compatto e potente, unico

nel suo genere: la possibilità di gestire la terapia seguendo diverse impostazioni dà al terapeuta un controllo assoluto del trattamento. Un dispositivo completo, capace di guidare la terapia mantenendo sicurezza ed efficacia terapeutica; la libreria patologica, i protocolli spiegati per fase, le innovative modalità terapeutiche e gli accessori pratici e funzionali fanno di **Doctor Tecar PLUS** un sistema fondamentale per una pratica terapeutica di alto livello.

Doctor Tecar PLUS si arricchisce inoltre del modulo AVx (Automatic Vehiculation eXperience system), una piattaforma con modalità innovative: la veicolazione transdermica e la possibilità di lavorare in modalità automatica ed automatica pulsata.

KNOW-HOW TECNOLOGICO

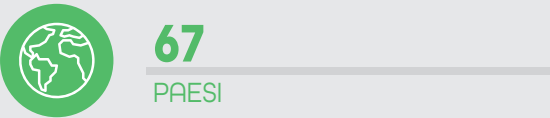

Con oltre 40 anni di esperienza Mectronic è uno dei principali produttori europei di sistemi fisioterapici e laser medicali, nonchè partner di numerose ed importanti università e centri di ricerca.

Grazie alla continua innovazione tecnologica, alla costante ricerca scientifica e alle collaborazioni con i maggiori esperti di settore, Mectronic garantisce terapie sicure e innovative per il recupero fisico del paziente.

40 ANNI DI INNOVAZIONI

1982

NASCE MECTRONIC

L'ingegnere Gian Carlo Aloisini fonda Mectronic insieme ad altri partner.



1985

IL PRIMO LASER A SCANSIONE

Mectronic progetta e costruisce il primo Scanner Laser disponibile in quattro diverse configurazioni: He-Ne, GaAs, CO₂ e Nd:Yag.



1997


FP3 SYSTEM

Mectronic progetta, breveta e produce il 1° laser al mondo a semiconduttore con 3 lunghezze d'onda (FP3 System).

2007

CONTROLLO TERMICO

Mectronic breveta il 1° sistema per misurare, elaborare e monitorare la temperatura cutanea durante i trattamenti.

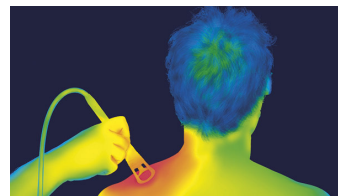

2009

E°C: EMISSIONE STOCASTICA BREVETTATA

Mectronic crea e breveta l'innovativa modalità di emissione stocastica a basso impatto termico che genera impulsi laser variabili in durata ed intensità.

2012

DOCTOR TECAR

Mectronic presenta Doctor Tecar, il nuovo dispositivo all'avanguardia per terapia Tecar, dotato dell'innovativa tecnologia Switching Real Time.



2020

NUOVI PRODOTTI

Mectronic presenta la nuova gamma di prodotti per laserterapia, tecar terapia e Chelt Therapy.



1984

IL PRIMO LASER

Progettazione e produzione del primo sistema laser a semiconduttore superpulsato.



1986

IL PRIMO LASER ND:YAG PER TERAPIA AL MONDO

Mectronic progetta il primo laser Nd:Yag al mondo ad emissione continua per la terapia fisica.



2006

PHARON DIATHERMY

Mectronic Medica progetta la prima tecar terapia multifrequenza con applicazione manuale, automatica ed automatica sequenziale.



2010

CHELT THERAPY

Nasce Chelt Therapy, sinergia tra laserterapia di potenza a 3 lunghezze d'onda e cryoterapia a secco a -35°.



2017

THEAL THERAPY

Mectronic breveta e presenta l'innovativa THEAL THERAPY:

Temperature controlled
High
Energy
Aadjustable multi-mode emission
Laser



IL TUO PARTNER NELLO SPORT

Che si tratti di prevenzione, cura degli infortuni o miglioramento delle prestazioni fisiche, i dispositivi Mectronic sono disponibili per i principali operatori medici e fisioterapici che si prendono cura dell'atleta professionista.

MECTRONIC MEDICALE È PARTNER UFFICIALE DI:



**TECHNICAL SUPPLIER
MEDICAL EQUIPMENT**



Mectronic
FORNITORE UFFICIALE
2022/23



FINP
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPIO



TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA MEDICINA

Per **Doctor Tecar PLUS** Mectronic ha adottato l'innovativa tecnologia **Switching Real Time Wave Cube**: grazie a questo importante step tecnologico è possibile raggiungere elevate potenze ed alte performance terapeutiche.

La tecnologia Switching Real Time ha inoltre consentito di ridurre le dimensioni del dispositivo: **Doctor Tecar PLUS** è compatto, potente e facilmente trasportabile.

Il manipolo di **Doctor Tecar PLUS** è stato studiato sia per l'erogazione in modalità capacitiva che resistiva: per impostare

la terapia è necessario un solo gesto, senza la necessità di dover cambiare l'applicatore.

Questa importante svolta è stata possibile grazie al know-how maturato da Mectronic nel corso di oltre 40 anni, progettando e producendo i componenti dei propri dispositivi in funzione del risultato terapeutico.

Un'attività di ricerca e sviluppo che è cresciuta nel tempo, grazie al diretto contatto con terapisti, ricercatori e addetti del settore; un'attenzione continua che rende i prodotti di Mectronic il più possibile vicini alle esigenze degli operatori e dei pazienti.

PER UNA TERAPIA SICURA ED EFFICACE

La tecnologia avanzata di **Doctor Tecar PLUS** ed il suo approccio innovativo al trattamento garantiscono un elevato livello di efficacia terapeutica. L'effetto diatermico che è in grado di generare consente un rapido recupero sia in fase acuta, sia subacuta che cronica. Inoltre **Doctor Tecar PLUS** consente un ampio grado di personalizzazione e di adattare la terapia in base alle esigenze specifiche dell'operatore e del paziente.

PATOLOGIE

- Sindrome da conflitto
- Lesioni alla cuffia dei rotatori
- Artrosi
- Epicondiliti
- Epitrocleiti
- Borsiti
- Fratture
- Distorsioni
- Lesioni muscolari
- Lesioni ai tendini
- Tendiniti
- Sindrome del tunnel carpale
- Pubalgia
- Ricostruzione LCA
- Contratture
- Lombalgie
- Sciatica
- Cervicalgia
- Brachialgia cervicale
- Spondilosi
- Coxartrosi
- Sindrome del piriforme
- Gonartrosi
- Fasiite Plantare
- Terapia post-chirurgica

TERAPIA PER EFFETTI

EFFETTO BIOSTIMOLANTE

La corretta dose di energia trasmessa ai tessuti genera i fenomeni di polarizzazione delle membrane cellulari. Il flusso di elettroliti che ne consegue favorisce gli scambi transmembrana nella cellula riequilibrando così la matrice intra ed extra cellulare e riattivando tutti i processi metabolici.

EFFETTO ANTALGICO

La corretta dose di energia interagisce con il sistema nervoso periferico. L'iperpolarizzazione delle fibre veloci, generata dalla rapida oscillazione del campo elettromagnetico, impedisce il propagarsi dello stimolo doloroso. Questo si traduce in una progressiva regressione della sintomatologia e una sensazione di ritrovato benessere per il paziente.

EFFETTO ANTINFIAMMATORIO

L'azione controllata della tecarterapia consente di dosare l'energia affinché lo stato naturalmente termico dei tessuti possa generare, attraverso una vasodilatazione controllata, il lavaggio dei cataboliti infiammatori nella regione lesa.

EFFETTO ANTIEDEMATIGENO

Il trasferimento di energia controllata attraverso i tessuti provoca l'aumento localizzato della temperatura degli stessi, stimolando il sistema circolatorio ad una termoregolazione. Ne consegue una forte vascolarizzazione e vasodilatazione delle aree ischemiche che favoriscono un immediato aumento della mobilità emolinfatica.

EFFETTO DECONTRATTURANTE

Il passaggio di energia attraverso i tessuti ed il flusso elettrolitico conseguente portano ad un aumento di calore localizzato. La vasodilatazione che ne consegue ha come effetto primario l'aumento del flusso ematico con un immediato beneficio delle aree poco vascolarizzate, poiché la presenza del sangue arterioso assicura la corretta ossigenazione muscolare.



Tecnologia S. R. T. Wave Cube

Design compatto e trasportabile

Facilità d'utilizzo



PERCHÈ SCEGLIERE **DOCTOR TECAR PLUS?**

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

Grazie alla tecnologia Switching Real-Time sviluppata da Mectronic **Doctor Tecar PLUS** rappresenta un autentico passo avanti nella tecarterapia: un sistema altamente innovativo in termini di tecnologia, prestazioni e metodo di utilizzo.

PRATICITÀ E VERSATILITÀ

La capacità della corrente Tecar di trasferire energia più o meno in profondità all'interno dei tessuti biologici è funzione della frequenza. **Doctor Tecar PLUS** consente di erogare corrente Tecar a 7 diverse frequenze, da 300kHz a 1,5MHz, includendo la ben nota frequenza 448 kHz.

PRECISIONE E AFFIDABILITÀ

L'avanzata tecnologia di **Doctor Tecar PLUS** garantisce potenza, precisione ed un trattamento efficace per tutte le esigenze terapeutiche.

UN'ESPERIENZA INTERATTIVA

Il touch-screen da 10.1" guida l'utente attraverso la gestione della terapia in modo semplice e intuitivo; efficace sin dal primo utilizzo.



TERAPIA FLESSIBILE:
CONTROLLO E
PERSONALIZZAZIONE



UN UNICO
MANIPOLO



SISTEMA
BIO-TRANSFER



MODALITÀ
AVX



7 DIVERSE
FREQUENZE



TRATTAMENTO IN FASE
**ACUTA, SUBACUTA E
CRONICA**





UN UNICO MANIPOLO

1

Doctor Tecar PLUS è dotato di un singolo manipolo per entrambe le modalità capacitiva e resistiva. Con un semplice comando è possibile passare da una modalità all'altra: semplicità e funzionalità in una tecnologia terapeutica all'avanguardia.

Il manipolo è progettato per essere il miglior alleato di ogni terapeuta nella pratica quotidiana: è leggero, ergonomico e realizzato in silicone biocompatibile conforme allo standard UL94 V2. Il manipolo è inoltre dotato di un sistema di riconoscimento della presenza dell'applicatore, evitando la possibilità di errori e massimizzando la sicurezza.



SISTEMA BIOTRANSFER




Doctor Tecar PLUS dispone dell'innovativo sistema Biotransfer per la rilevazione della quantità di energia trasferita ai tessuti, che viene segnalata attraverso un feedback grafico ed acustico.

Il sistema rileva l'energia trasferita ai biotessuti all'interno del distretto anatomico trattato, in relazione al tempo e alla potenza erogata.

Questo sistema permette di valutare l'iperemia attiva ed il

conseguente incremento del flusso elettrolitico, evidenziando la variazione di impedenza elettrica durante il trattamento rispetto al valore iniziale in condizione di riposo.

La variazione dell'impedenza permane nel tempo anche oltre la fine del trattamento, assicurando una corretta e continuativa ossigenazione di tutte le componenti tissutali trattate.

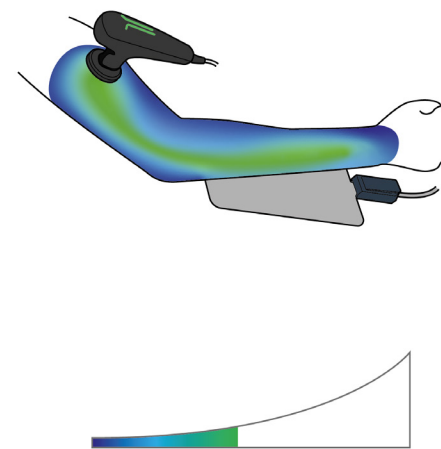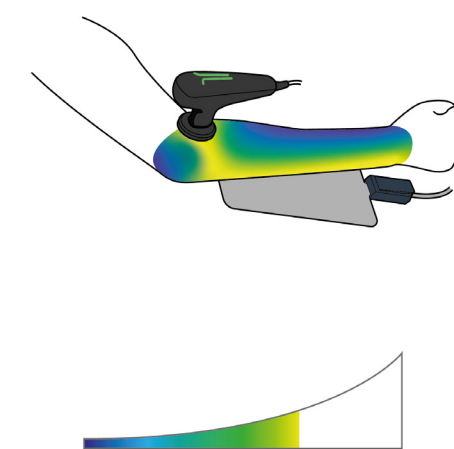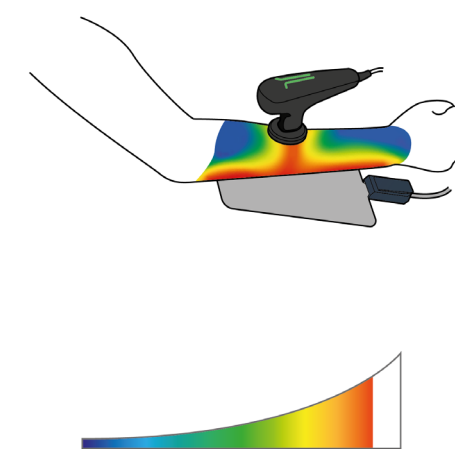POWER: **25 VA** | TIME: **02:00**POWER: **25 VA** | TIME: **02:00**POWER: **25 VA** | TIME: **02:00**

TRATTAMENTO IN FASE ACUTA, SUBACUTA E CRONICA



Fino a 200 VA di potenza

Il controllo accurato della potenza e l'elevato range di potenze consente di trasferire energia in modo mirato, sicuro ed efficace, massimizzando i risultati terapeutici.

Grazie a questa flessibilità di lavoro, l'operatore può trattare diverse patologie di pazienti diversi, in diverse modalità e con differenti applicatori.

Per ottimizzare ulteriormente il trattamento **Doctor Tecar PLUS** può raggiungere fino a 600 W peak to peak (Wpp), consentendo al terapeuta di espandere le possibilità operative.

Multifrequenza

La modalità resistiva (450 kHz) e la modalità capacitiva (600 kHz) sono solo due delle frequenze di utilizzo di **Doctor Tecar PLUS**: grazie alla tecnologia di commutazione in tempo reale di Mectronic il dispositivo è in grado di passare tra sette diverse frequenze in un intervallo che si estende da 300 kHz a 1,5 MHz, massimizzando gli effetti terapeutici.

MODALITÀ RESISTIVA

La modalità resistiva consente alla corrente di fluire attraverso i tessuti più duri del corpo come ossa, legamenti e tendini importanti, che generalmente contengono una minore quantità di acqua. In questo modo si ha un'azione della terapia più focalizzata sulla sezione anatomica desiderata.

MODALITÀ CAPACITIVA

La modalità CAPacitiva concentra l'energia principalmente verso i tessuti più morbidi del corpo umano, come muscoli ed aree ricche di acqua, permettendo al terapeuta di concentrare l'azione della terapia verso le sezioni anatomiche che contengono una maggiore quantità di fluidi.

MODALITÀ CUSTOM

La modalità Custom (f) consente al terapeuta di scegliere la frequenza con la quale erogare la terapia.

MODALITÀ SWING

La modalità Swing consente di effettuare un trattamento di tecar terapia multi frequenza. L'utente può scegliere tra due tipologie di modalità "Swing", la frequenza iniziale e la frequenza finale di erogazione della terapia, impostando il tempo di erogazione per ogni step di frequenza.





PER UNA TERAPIA FLESSIBILE

CONTROLLO E PERSONALIZZAZIONE

Doctor Tecar PLUS è un sistema completo, uno strumento flessibile in grado di supportare al meglio il lavoro quotidiano del terapeuta. Grazie alla tecnologia Switching Real Time Wave Cube, **Doctor Tecar PLUS** offre una gamma di modalità per l'impostazione della terapia, nonché funzionalità altamente innovative.

MODALITÀ **TIME/JOULE**

Doctor Tecar PLUS può impostare l'emissione a seconda dei parametri tempo ed energia. Nel primo caso l'operatore può indicare il tempo di terapia e **Doctor Tecar PLUS** termina di erogare al raggiungimento del tempo di terapia impostato.

Nella modalità Joule l'operatore può impostare la dose energetica della terapia; l'erogazione terminerà al raggiungimento del valore impostato.




MODALITÀ **PULSATA REGOLABILE**

Effective thermal control

Nel trattamento delle patologie muscolo scheletriche in fase acuta, un eccessivo incremento degli effetti dell'iperemia attiva può causare la vasodilatazione. Quest'ultima provoca una sensibilizzazione pronunciata degli algorecettori, generando un'insofferenza del paziente rispetto alla terapia. Per ridurre questa situazione **Doctor Tecar PLUS** dispone della

Modalità Pulsata Regolabile, con la quale l'erogazione avviene secondo intervalli di tempo regolari. Le pause (t off) tra un impulso e altro (t on) consentono di controllare l'energia somministrata ai tessuti, rispettando la condizione di stato "naturalmente termico" a vantaggio della corretta omeostasi cellulare. Si escludono così tutti gli effetti collaterali non desiderati come

l'aumento dello stimolo algico. Inoltre la Modalità Pulsata Regolabile di **Doctor Tecar PLUS** permette all'operatore di impostare personalmente i tempi di erogazione e di pausa (t on e t off), garantendo una terapia su misura per ogni paziente. E' possibile quindi operare in modalità termica, naturalmente termica ed in atermia.

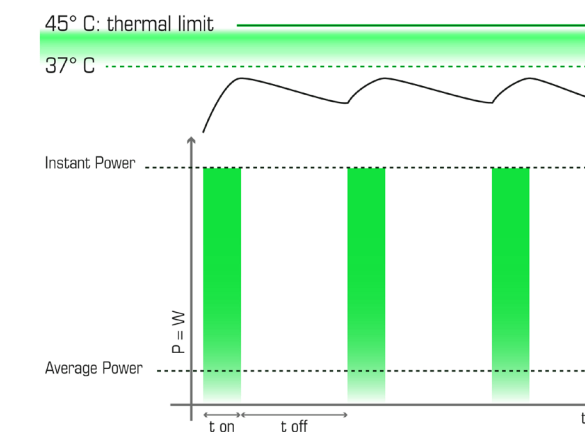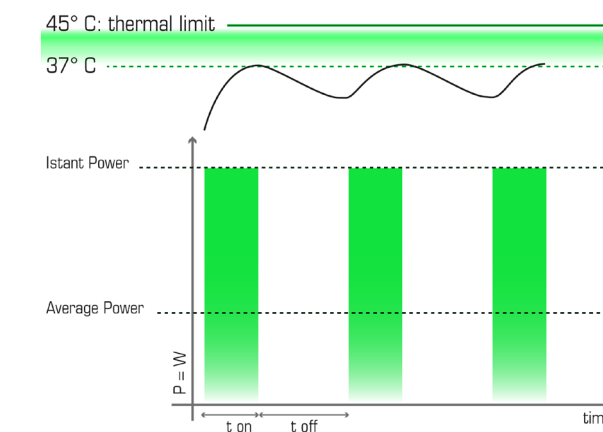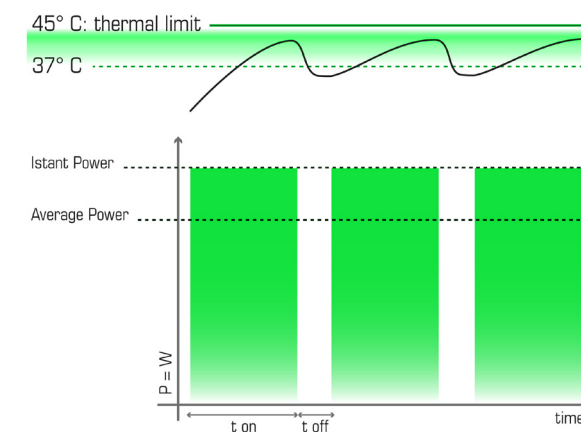



LA GESTIONE DEL TRATTAMENTO



Software MecOS 5.0: l'innovazione della terapia

LIBRERIA **PATOLOGICA**

Doctor Tecar PLUS dispone di una libreria patologica che comprende oltre 60 patologie con relativi protocolli interattivi suddivisi per fasi. Il software inoltre offre la sicurezza di un feedback grafico immediato che visualizza potenza, tempo ed effettiva erogazione del dispositivo.

UNA SOLUZIONE **MIRATA**

Doctor Tecar PLUS ha introdotto un'importante innovazione nell'impostazione del trattamento: per una terapia su misura e più efficiente, **Doctor Tecar PLUS** imposta automaticamente i migliori valori di potenza, energia e modalità di emissione in base ai dati del paziente (somatotipo, età, livello di dolore) inseriti dal terapeuta.

GUIDA AI **TRATTAMENTI**


La libreria patologica di **Doctor Tecar PLUS** include un protocollo dedicato per ogni patologia. L'interfaccia utente guida chiaramente l'operatore su come trattare il paziente con una descrizione dettagliata ed informazioni dedicate.

SICUREZZA E **CONTROLLO**

Per consentire al terapeuta la possibilità di verificare eventuali errori o problemi che possono verificarsi, **Doctor Tecar PLUS** ha integrato una schermata di servizio completa e semplice nelle impostazioni del dispositivo.

La schermata di servizio è inoltre dotata di un sistema automatico di controllo dei cavi: un semplice test consente di controllare rapidamente il corretto funzionamento dei cavi.



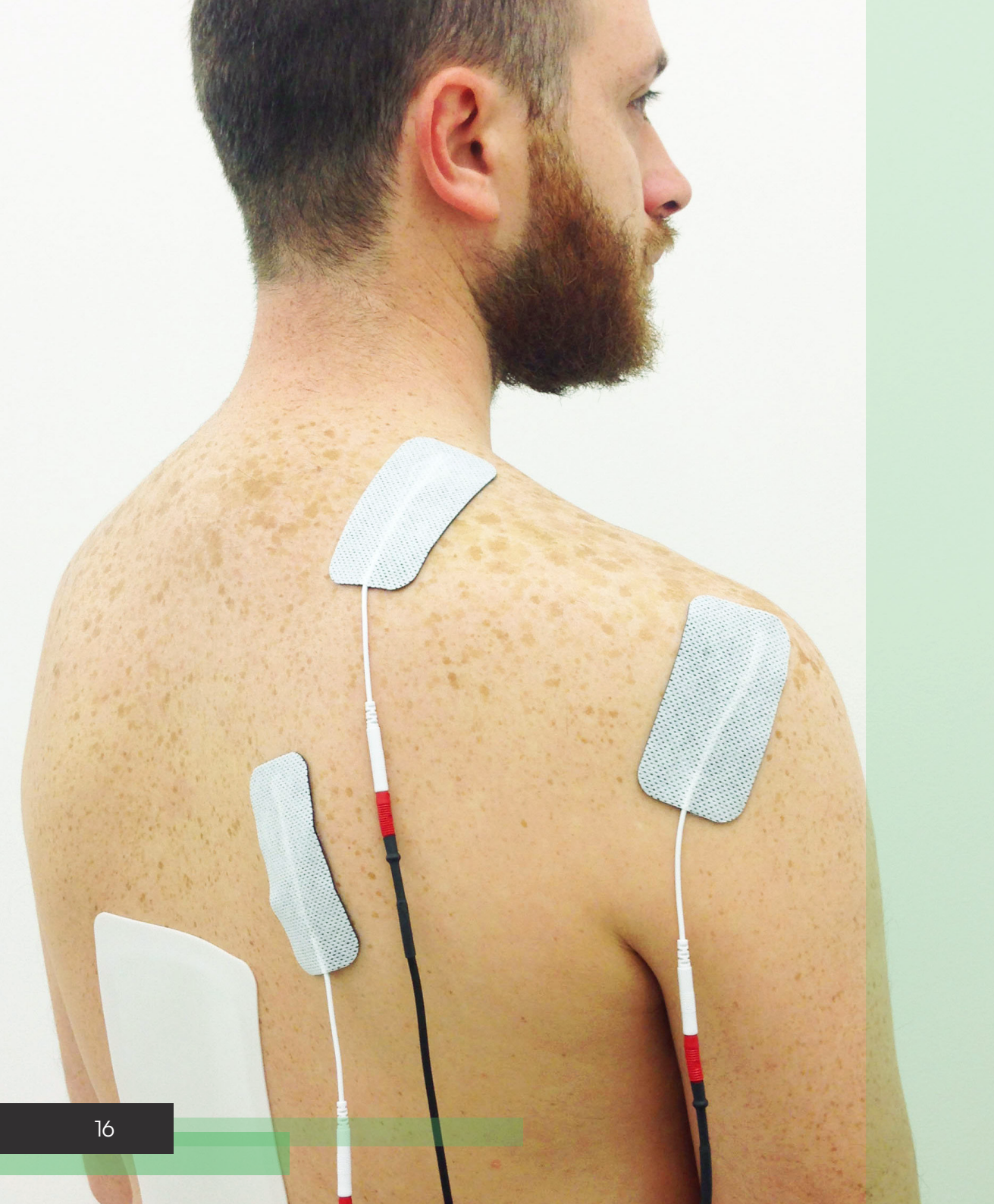

MODALITÀ

Spesso durante il loro lavoro quotidiano i terapeuti devono liberarsi temporaneamente dal trattamento manuale, poiché operano costantemente e senza pause.

Per questo motivo **Doctor Tecar PLUS** ha introdotto la possibilità di operare in modalità automatica. Questa innovazione consente al terapeuta di non essere legato al dispositivo.

Ottimizzazione del tempo con la modalità automatica

Con la **modalità AVx** la tecarterapia non sarà più la stessa: con quattro nuove modalità progettate per soddisfare le esigenze del terapeuta, **Doctor Tecar PLUS** si trasforma in un'unica piattaforma in grado di supportare al meglio l'attività terapeutica.

La modalità automatica di **Doctor Tecar PLUS** è stata progettata per consentire al terapeuta di essere libero dall'uso manuale della tecarterapia: lo speciale cavo ed i tre elettrodi consentono di trattare anche le aree del corpo di forma complessa.

La modalità AVx consente l'integrazione di 4 nuove modalità: due flussi di emissione (simultaneo e sequenziale) ognuno dei quali ha tre modalità di emissione (continua, pulsata e dimmer).



MODALITÀ SIMULTANEA

Emissione automatica sincronizzata

La modalità simultanea è una modalità impostata dall'operatore in cui l'energia viene erogata da tutti gli elettrodi contemporaneamente. L'energia può essere erogata in un flusso costante di corrente (se si seleziona l'Emissione continua) o con flussi di corrente pulsati (se si seleziona l'Emissione pulsata, per la quale è possibile impostare anche la modalità operativa).

Il trattamento per la modalità simultanea viene effettuato utilizzando l'apposito cavo automatico, grazie al quale la presenza del terapeuta non è più obbligatoria.

È possibile personalizzare il trattamento regolando l'energia, la modalità operativa e la modalità di emissione.

MODALITÀ SEQUENZIALE

Emissione automatica sequenziale avanzata

La modalità sequenziale è una modalità impostata dall'operatore in cui l'energia viene erogata dagli elettrodi uno dopo l'altro, seguendo un ordine preciso. L'energia può essere erogata in un flusso costante di corrente (se si seleziona l'Emissione continua) o con flussi di corrente pulsati (se si seleziona l'Emissione pulsata, per la quale è possibile impostare anche la modalità operativa).

È possibile personalizzare il trattamento regolando l'ordine in cui gli elettrodi erogheranno l'energia, la modalità operativa e la modalità di emissione. In modalità sequenziale è inoltre possibile impostare il tempo di erogazione di ciascun elettrodo.

Una volta che il terapeuta ha scelto la configurazione per la sua terapia, il software consente di salvare la configurazione come un protocollo personalizzato, che può essere sempre recuperato nella libreria dedicata del software.

Il trattamento per la modalità sequenziale viene effettuato utilizzando l'apposito cavo automatico, grazie al quale la presenza del terapeuta non è più obbligatoria.



Emissione **CONTINUA**

Questa modalità consente alla corrente tecar di fluire in modo costante e continuo nel tempo.

Emissione **PULSATA REGOLABILE**

In questa modalità il dispositivo emette impulsi di corrente tecar per ciascun elettrodo attivo. L'erogazione avviene secondo intervalli di tempo regolari prefissati che permettono il trasferimento energetico controllando l'effetto termico sui tessuti.

Emissione **DIMMER**

L'innovativa modalità Dimmer consente di combinare in una unica emissione gli effetti benefici della modalità continua e della modalità pulsata permettendo di gestire al meglio gli effetti termici durante il trattamento.

CAVO AUTOMATICO

L'apposito cavo a tre elettrodi permette a **Doctor Tecar PLUS** di coinvolgere geometrie anche complesse dei distretti anatomici.

MASSIMA SICUREZZA

Il paziente può interrompere la terapia velocemente ed in qualsiasi momento grazie al pulsante di arresto di facile utilizzo.



Doctor Tecar **PLUS**
Standard | AVx



SPECIFICHE TECNICHE

TECNOLOGIA	Sistema operativo Real-Time proprietario MecOS 5.0
POTENZA EFFETTIVA	200 VA
POTENZA DI PICCO	600 Wpp
BIOTRANFER	Feedback grafico ed acustico
ACCOPPIAMENTO	Sistema di controllo contatto
CONTROLLO CAVI	Check automatico con feedback grafico ed acustico
DISPLAY	TOUCH SCREEN A COLORI 10.1" CAPACITIVO
ALIMENTAZIONE	100÷240V 50÷60Hz
ASSORBIMENTO	250VA
DIMENSIONI	290 x 265 x 150 mm (senza carrello) 516 x 516 x 1017 mm (con carrello)
PESO	4,5 kg (escluso carrello) 23,5 kg (con carrello)
CONFORMITÀ	IEC/EC 60601-1 60601-1-2
DIRETTIVA 93/42	IIb Classification
FREQUENZE	300 kHz - 448 kHz - 500 kHz - 750 kHz - 1 MHz - 1.2 MHz - 1.5 MHz

ACCESSORI INCLUSI



COD. 20MA.DTLED
Manipolo "Plus" con Led e attacco magnetico



COD. 80024
Cavo comune



cod. 30CL.PLS-T
Carrello porta dispositivo e accessori



COD. 80046 A
Piastra comune
150 x 200 mm
Acciaio inox



COD. 80046
Piastra comune
200mm x 280mm
Acciaio inox



COD. 20PI.DTP35P
Piattello piatto
Ø 35 mm
Copertura in POM



COD. 20PI.DTP60P
Piattello piatto
Ø 60 mm
Copertura in POM



cod. 80035
Cavo di alimentazione



COD. 80042F
Crema conduttiva



COD. 20PI.DTB35P
Piattello arrotondato
Ø 35 mm
Copertura in POM



COD. 20PI.DTB60P
Piattello arrotondato
Ø 60 mm
Copertura in POM

ACCESSORI OPZIONALI



COD. 30MA.DTBIP0-P
Manipolo Bipolare Small



COD. 30MA.DTBIP0-G
Manipolo Bipolare Big



cod. 150
Borsa



COD. 20PI.DTP85P
Piattello piatto
Ø 85 mm
Copertura in POM



COD. 20PI.DTB85P
Piattello arrotondato
Ø 85 mm
Copertura in POM

ACCESSORI AVX OPZIONALI



cod. TRX
Cavo per applicazione automatica



COD. 80019
Confezione 10 piastre comuni adesive



COD. 80073
Elettrodi adesivi
Dimensioni: 40mm x 80mm
Confezione da 120 pezzi



cod. 80054
Pulsante paziente



www.mectronicmedicale.com

Follow us:



Si precisa che i dati tecnici, le informazioni e le raffigurazioni riportate nel presente documento mantengono un valore puramente indicativo. MECTRONIC MEDICALE S.r.l. si riserva in qualsiasi momento e senza preavviso di modificare i dati, i disegni e le informazioni riportate nel presente documento.

Mectronic Mediale srl - BR_DPF_IT_2020-10_001



MECTRONIC MEDICALE s.r.l.

via Orio al Serio 15,
24050 Grassobbio (BG) - ITALY
Tel: +39 035656080 | Fax: +39 035657361

www.mectronicmedicale.com | info@mectronicmedicale.it